


## תומך FlexiForm לשורש כף היד ולאגודל

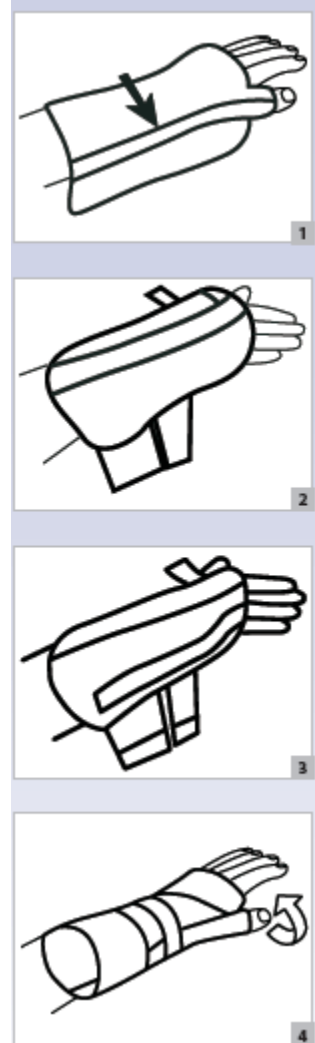

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

### שימוש מיועד/התוויות

- אידאלי לנקעים, דלקת מפרקים, פציעות במפרקים וברצועות של שורש כף היד והאגודל.

### התוויות נגד

- אין

### אזהרות

אם מופיעים במהלך השימוש במוצר זה כאב, נפיחות, שינויי תחושה או תגובות חריגות אחרות, יש לפנות מיד לרופא.

### הוראות יישום

- (1) הנח את התומך סביב שורש כף היד הפצוע (שמאל או ימין). הכנס את האגודל למקומו המיועד, הנמצא בקצה התומך.

- (2) עזב את פס התמיכה לצד הפנימי של כף היד ומקם אותו בצד הפנימי של שורש כף היד וכף היד.
- (3) עזב את פס האלומיניום התומך את האגודל כך שיחזיק את האגודל כשהוא פשוט הצידה.
- (4) סגור והדק את רצועות הצמדן.
- (5) לאחר מכן סגור והדק סביב האגודל את רצועת הצמדן המיועדת לאגודל.
- (6) כוונן את מידת ההידוק של הרצועות בהתאם ללחץ ולנוחות הרצויים.

### **הוראות ניקוי**

יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין, ולייבש באוויר. אין להשתמש בחומר מלבין. אין לנקות בניקוי יבש או לייבש במייבש כביסה. אין לגהץ.  
נטול לטקס

### **מיועד לשימוש של מטופל יחיד**

**אחריות:** חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.  
לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.