

## ברכית גמישה FORTILAX



**לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.**

### **התוויות**

- תמיכה ולחץ עקב פציעה חריפה או כרונית של הברך ודלקת מפרקים ניוונית קלה של הברך
- גירוי פרופריוצפטיבי וניורומוסקולרי באמצעות לחץ

### **התוויות נגד/אזהרות**

אין

### **הוראות יישום**

אחוז בשולי הברכית, בפתח הגדול יותר. משוך את הברכית על הברך.

### **הוראות ניקוי**

יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר. אין לכבס במכונת כביסה או להשתמש בחומר מלבין.

**אחריות:** חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

### **לשימוש המטופל**

### **מיועד לשימוש של מטופל יחיד**

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.