

DONJOY

GenuForce®

Knitted Knee Support

RODILLERA ELÁSTICA

STRICKBANDAGE FÜR DAS KnieGELENK

SUPPORTO PER GINOCCHIO IN MAGLIA

ATTELLE DE GENOU TRICOTÉE

KNIESTEUN VAN GEBREID MATERIAAL

KOLENNÁ ORTÉZA Z ÚPLETU

STRIKKET KNÆSTØTTEBIND

VÄVT KNÄSTÖD

NEULOTTU POLVITUKI

PLETENÁ POLENNÍ ORTÉZA

JOELHOIRA EM TECIDO

STRIKKET KNESTØTTE

編織膝部固定器

ニット製膝サポート



DJO
GLOBAL



دعامة منسوجة للركبة

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

بروفيل المستخدم المقصود

يجب أن يكون المستخدم قادرًا على ما يلي:

- قراءة وفهم التوجيهات، التنبيهات والتحذيرات.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

دعامة للركبة مع سند من سيليكون لتزويد الدعم والضغط

الميزات

- سند مرن من السيليكون حول الركبة يقوم بتخفيض مستوى الضغط ويخفف عن الرضفة (عظم رأس الركبة)
- تساعد على تزويد الرضفة بتوجيه خفيف
- لا تتجعد ولا تنزلق من أجل راحة اللبس
- نسيج يتكيف شكله للمبنى التشريحي بثلاثة أبعاد لتوفير ضغط
- مادة صالحة للتنفس

دلائل الاستعمال

- للاستخدام بعد عملية جراحية أو بعد صدمة، التهاب مزمن في الأنسجة الرخوة بمفصل الركبة
- انصباب مفصلي متكرر
- شعور بعدم الاستقرار
- إصابات في الهلالة (Meniscus)
- إصابات في الأربطة
- ألم مرتبط بالحمّل في الركبة
- تورم

موانع الاستعمال

لا توجد موانع استعمال معروفة.

ينبغي استخدام دعامة الركبة @GENUFORCE فقط بعد استشارة أخصائيي الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من الأعراض التالية:

- أمراض جلدية وإصابات في منطقة الركبة (مثل تغيرات جلدية متعلقة بالحساسية، تهيج، ندبات مع تورم، احمرار، ارتفاع حرارة الجسم)
- دوالي ورديدية مع اضطرابات جريان رجوعي
- اضطرابات لمفاوية، تورم غير واضح بالنسيج الرخو حول منطقة الركبة
- اضطرابات بالدورة الدموية أو اضطرابات حسية في الساقين

تحذير واحتياطات

المنتج معدّ لاستخدام مريض واحد فقط. إذا ظهر ألم، تورم، تغيرات في الإحساس أو ردود فعل غير عادية أخرى أثناء استخدام هذا المنتج، عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

تعليمات الاستعمال

1. اجلس من أجل ملائمة دعامة @GENUFORCE.
2. أمسك دعامة الركبة بكلتا اليدين من الحافة الزرقاء العليا
3. اسحب الدعامة فوق الركبة، بحيث يغطي سند السيليكون الدائري الركبة بشكل متساوٍ.
4. ينبغي وضع سند السيليكون بحيث يكون الجزء الطويل تحت منتصف عظم رأس الركبة.

تعليمات الاستخدام

- يتم لبس الدعامة مباشرة على الجلد. لذلك، ينبغي أن يكون الجلد خاليًا من الإصابات، خاليًا من الرطوبة، الزيوت، الكريمات، الجل أو بقايا مواد مشابهة عند لبس الدعامة.
- الدعامة معدّة لاستخدام مريض واحد فقط.
- ينبغي عدم لبس الدعامة لأكثر من 8 ساعات في اليوم.
- مع الاستخدام السليم ومراعاة كل التعليمات، لن تظهر نقاط ضغط.
- لن يتحمل المنتج أية مسؤولية عن أي تغييرات في المنتج أو عن استخدام غير صحيح.

العناية

- ينبغي غسلها في مياه فاترة (30 درجة مئوية على الأكثر) مع مادة منظفة معتدلة
- نشفها في الهواء (لا تضعها على مشعاعات/سخانات أو غيرها من مصادر الحرارة)
- لا تستخدم مواد التبييض أو الكلور، الكي ممنوع.

التركيب

المادة المنسوجة: بولي أميد، إيلاستين، بوليستر / السند: سيليكون / الغطاء:

قماش تيري

تحذير: يحتوي هذا المنتج على لاتكس من المطاط الطبيعي الذي قد يسبب ردود فعل حساسية

معدّ للاستخدام على مريض واحد

بإطار كفاءة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة سنة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.