

GenuForce®

ברכית סרוגה

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

הפרופיל של המשתמש המיועד

המשתמש חייב להיות מסוגל:

- לקרוא ולהבין את ההוראות, האזהרות ואמצעי הזהירות.

שימוש מיועד/התוויות

ברכית עם כרית סיליקון תומכת המספקת תמיכה ולחץ

תכונות

- תמיכת סיליקון גמישה סביב הברך מפחיתה את רמת הלחץ ומפחיתה את הלחץ המופעל על הפיקה
- הברכית נותנת לפיקה כיוון קל
- הברכית נטולת קמטים ואינה מחליקה, כך שהשימוש בה נוח יותר
- סריג בעל התאמה תלת-ממדית לקווי המתאר האנטומיים, המספק לחץ
- חומר נושם

התוויות

- שימוש לאחר ניתוח או לאחר טראומה, דלקת כרונית של הרקמה הרכה של מפרק הברך
- אירועים חוזרים של נזלים במפרק
- תחושת חוסר יציבות
- פציעות במניסקוס
- פציעות ברצועות
- כאבי ברך הקשורים לעומס
- נפיחות

התוויות נגד

אין התוויות נגד ידועות.

יש להשתמש בברכית GENUFORCE® רק לאחר התייעצות עם איש צוות רפואי, עם הופעת התסמינים הבאים:

- מחלות עור ופגיעות בעור באזור הנגוע (לדודמה, שינויים בעור עקב אלרגיה, גירויים, צלקות עם נפיחות, אדמומיות, היפרתרמיה)
- דליות עם הפרעות הכוללות חזרת דם אחורה
- הפרעות לימפתיות, נפיחות בלתי מובחנת ברקמה הרכה סביב אזור הברך
- הפרעות במחזור הדם או הפרעות תחושה ברגליים

אזהרות

המוצר מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד. אם מופיעים במהלך השימוש במוצר זה כאב, נפיחות, שינוי תחושה או תגובות חריגות אחרות, יש לפנות מיד לרופא.

הוראות יישום

1. שב כדי ליישם את GENUFORCE®.
2. אחוז בשתי הידיים בברכית, בשוליים הכחולים העליונים.
3. משוך את הברכית מעל לברך, כך שתמיכת הסיליקון העגולה תכסה את הפיקה באופן שווה.
4. יש למקם את תמיכת הסיליקון כך שהחלק הארוך שלה יימצא מתחת למרכז הפיקה.

הוראות שימוש

- את הברכית מניחים ישירות על העור. לכן כשמניחים את הברכית העור חייב להיות ללא פציעות, לחות, שמנים, קרמים, גלים או שיירים דומים.
- הברכית מיועדת לשימוש של מטופל יחיד בלבד.
- אין לעטות את הברכית במשך יותר מ-8 שעות ביממה.
- בשימוש נכון והקפדה על כל ההוראות לא אמורות להופיע נקודות לחץ.
- היצרן לא יישא באחריות לכל שינוי במוצר או לשימוש לא נכון.

הוראות ניקוי

- יש לכבס ביד במים קרים (לכל היותר 30°) עם סבון כביסה עדין.
- יש לייבש באוויר (אין להניח על רדיאטור/תנור חימום או על מקור חום אחר)
- אין להשתמש במלבין או בכלור. אין לגהץ.

הרכב

סריג: פוליאמיד, אלסטין, פוליאסטר / תמיכה: סיליקון / כיסוי: אריג מגבת
זהירות: מוצר זה מכיל גומי לטקס טבעי העלול לגרום לתגובות אלרגיות
מיועד לשימוש של מטופל יחיד

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.