
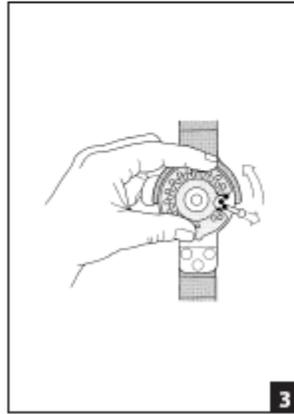
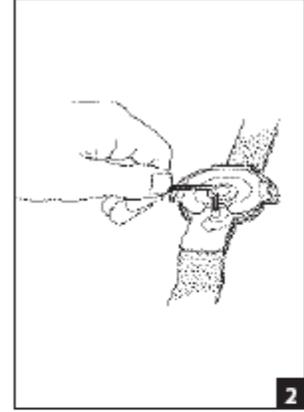


مشد الورك Hip Brace

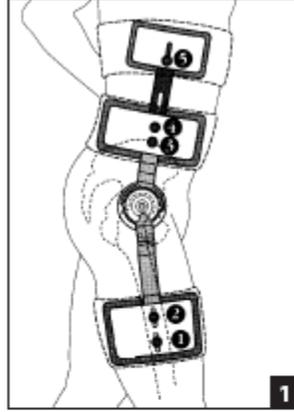

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

دواعي الاستعمال: التثبيت بعد العملية الجراحية الذي يتبع رأب المفصل أو ORIF للكسور في تجويف الرقبة • تثبيت/حماية الحركة في المعالجة الوقائية لفصل الورك الحاد • التثبيت/حماية الحركة أثناء إعادة التأهيل الذي يتبع رأب المفصل أو ORIF للكسور في تجويف الرقبة • التثبيت للأوراك في حالة الفصل المزمن • تثبيت الورك الذي يتعب الصدمة • السيطرة على الحركة/التثبيت الذي يتبع تشنج عضلات الفخذ أو العرقوب، أو بعد جراحة الأنسجة اللينة من الساق العلوية.

- (1) ضع العلاقة فوق مركز العلاقة، وفوق نتوء أكبر مدور ولأمام قليلاً واربط حزام الرسغ بثنبات.
- (2) فك البراغي 1 و 2 باستخدام مفتاح البراغي المرفق. ضع اللوحة المفصلية على الثلث الأوسط من الفخذ. شد البراغي 1 و 2 مرة أخرى واربط حزام الفخذ بثنبات.
- (3) فك البراغي 3 و 4. ضع لوحة الرسغ على الرسغ فقط فوق العرف الحرقفي. شد البراغي 3 و 4 مرة أخرى واربط حزام الفخذ بثنبات.

- (4) سيسمح فك البرغي #5 بتعديل لوحة الصدر على المرضى الأطول. يجب توسيع لوحة الصدر لأطول ما يمكن للحصول على أقصى فعالية. يجب الانتباه بأن لوحة الصدر لا يسبب فرك الذراع الداخلي أو تتداخل مع حركة الذراع أو بخرق البنى الوعائية العصبية.
- (5) يجب أن تكون جميع الأحزمة على قدر الجسم، ولكن تأكد من أن حزام الفخذ لا يعيق الدورة الدموية للساق الأسفل، وخاصة في ألك المرضى عرضة للالتهاب وريدي. يجب فحص نبض القدم بعد الاستخدام.

تعليمات لتعديل مدى حركة العلاقة

اثن غطاء العلاقة البلاستيكية حتى يُظهر الشق المسمار المحدد. انزع المسمار المحدد واستبدله في وضع الدرجة المطلوب. للحفاظ على وضع الدبوس، أدر غطاء العلاقة بحيث تكون حدود الانتشاء والتمدد مغطية والشق مواجهًا للأسفل. لمنع دوران غطاء العلاقة، ادخل برغي التثبيت وشده باستخدام مفتاح ألن المرفق.

تعليمات حول تعديل زاوية الفصل

توضع زاوية الفصل على 15 درجة. بسبب التغيرات التلقائية أو بروتوكولات التعديل، قد يكون من الضروري تغيير زاوية الفصل. نوصي باستخدام مسامير التني لتعديل المشد.

الاستعمال والعناية

- للاستخدامات بعد العملية الجراحية، قد يُطلب استخدام سنادات إسفنجية إضافية لتسمح بالتجول.
 - قد يُطلب كذلك أحزمة إضافية.
 - قد يتم تشذيب اللوحات البلاستيكية أو تشكيلها بالتسخين للحصول على أقصى تطابق.
 - يغسل يدويًا في ماء بارد مع صابون لطيف ويجفف بالهواء.
- تحذير:** ينبغي استعمال هذا المنتج تحت إشراف أخصائي في المجال الطبي. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام العام غير الخاضع للرقابة. تحذيرات واحتياطات: إذا عانيت من أي ألم أو تورم أو تغييرات بالإحساس أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك.

لاستخدام مريض واحد فقط.

منتج Rx

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: بينما تم بذل كل الجهود في مجال التقنيات الفنية للحصول على أقصى قدر من التطابق الوظيفي والقوة والامتانة والراحة، وهذا الجهاز هو عنصر واحد في برنامج العلاج الشامل الذي يديره الأخصائي الطبي. ليس هناك ما يضمن أن استخدام هذا المنتج سيمنع الإصابة.

تنبيه: يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.
الأخصائي