
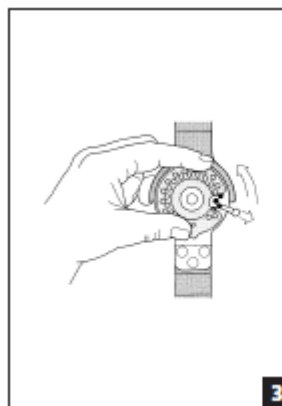
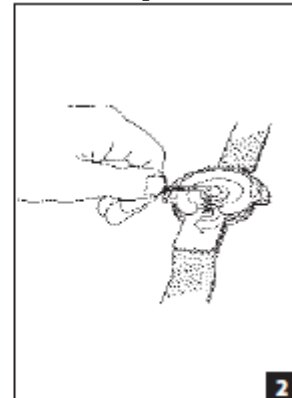


מייצב ירך

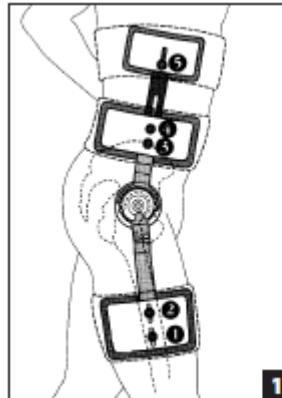

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

התוויות: מניעת תזוזה לאחר ניתוח בעקבות ארתרופלסטיקה של הירך או רדוקציה פתוחה וקיבוע פנימי (ORIF) של שברים בצוואר הירך • מניעת תזוזה/הגנה על התנועה במסגרת טיפול שמרני בנקע חריף של הירך • ייצוב/תנועה מוגנת במהלך שיקום לאחר ארתרופלסטיקה של הירך או רדוקציה פתוחה וקיבוע פנימי (ORIF) של שברים בירך. • ייצוב של נקע כרוני במפרק הירך • ייצוב של הירך לאחר שבץ • תנועה מבוקרת/מניעת תזוזה לאחר קרע חריף בשריר הארבע ראשי או בשרירי מיתר הברך, או לאחר ניתוח ברקמות הרכות בחלק העליון של הרגל.

- 1) מקם את הציר על מרכז המפרק, מעל בליטת הטרוכנטר הגדול וקצת קדימה, והדק היטב את רצועת המותן.
- 2) שחרר את ברגים 1 ו-2 באמצעות המברג המצורף. מקם את לוחית הירך על השליש המרכזי של הירך. הדק חזרה את ברגים 1 ו-2 וסגור והדק היטב את רצועת הירך.
- 3) שחרר את ברגים 3 ו-4. מקם את לוחית המותן על המותן, מיד מעל לעצם הכסל. הדק חזרה את ברגים 3 ו-4 וסגור והדק היטב את רצועת המותן.
- 4) באמצעות שחרור בורג מס' 5 ניתן לכוון את לוחית החזה אצל מטופלים גבוהים יותר. יש להאריך את לוחית החזה ככל האפשר כדי לקבל מינוף מרבי. יש להקפיד שלוחית החזה לא תשתפשף בצד הפנימי של הזרוע, שלא תפריע לתנועת הזרוע ושלא תפגע במבנים של עצבים וכלי דם.
- 5) יש לסגור היטב את כל הרצועות ולוודא שאין רצועה המהודקת עד כדי פגיעה בזרימת הדם לחלק התחתון של הרגל, במיוחד אצל מטופלים עם נטייה לדלקת ורידים. יש לבדוק דפקים בכף הרגל לאחר היישום הראשוני.

הוראות לכוון הציר

סובב את כיסוי הפלסטיק של הציר עד שהמפסק יחשוף את הפין המגביל. הוצא את הפין המגביל והכנס אותו למיקום המתאים, בהתאם לדרגת הכוון הרצויה. כדי לשמור על הפין במקומו, סובב את כיסוי הציר כדי שגבולות הכיפוף והיישור יכוסו והמפסק יפנה כלפי מטה. כדי למנוע מכיסוי הציר מלהסתובב, הכנס את בורג הביטחון וחזק אותו במפתח אלן המצורף.

הוראות לכוון זווית ההצדדה

זווית ההצדדה מכוונת מראש ל-15°. בגלל שונות אנטומית או שונות בין פרטוקולים, ייתכן שיהיה צורך לשנות את זווית ההצדדה. מומלץ לכוון את המייצב באמצעות פסי מתכת כפיפים.

שימוש וניקוי

- ליישום לאחר ניתוח, אפשר להזמין רפידות ספוג נוספות כדי לכבס את המייצב.
 - ניתן להזמין גם רצועות נוספות.
 - את לוחיות הפלסטיק ניתן לקצר או לעצב בחום להתאמה מיטבית.
 - יש לכבס ביד את רפידות הספוג במים קרים עם סבון כביסה עדין, ולייבש באוויר.
- אזהרה:** יש להשתמש במוצר זה בפיקוח של איש צוות רפואי. האביזר אינו מיועד לשימוש ציבורי ללא פיקוח. אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.

מוצר במרשם

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, אביזר זה הוא רק גורם אחד בתכנית הטיפול הכוללת שקבע איש הצוות הרפואי. אין ערבות לכך שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה. זהירות: על פי החוק הפדרלי (ארה"ב), מכירת אביזר זה מותרת רק על-ידי איש צוות רפואי מורשה או בהוראתו.