

מייצב לעצם הזרוע



לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

התוויות: שברים יציבים בעצם הזרוע • שברים יציבים מעל לקונדילוס • רדוקציה פתוחה וקיבוע פנימי (ORIF) של שברים בעצם הזרוע

• ניתוחי תיקון של השריר הדו-ראשי/התלת-ראשי

ניתן להשתמש במייצב זה לטיפול חריף בשברים בעצם הזרוע.

הוא מיועד לסייע בהפחתת חלק מאי-הנוחות ההתחלתית השכיחה בשלבים החריפים של הפציעה.

מוצר זה תוכנן כהשלמה למגוון הטיפולים הרפואיים השכיחים, המיועדים לטיפול במכאובים כמו אלה המתוארים לעיל. איש הצוות הרפואי שרשם לך את המוצר יקבע את תדירות ומשך השימוש.

התוויות נגד: אין

הוראות יישום:

1) התחל כשהמטופל יושב ורוכן מעט קדימה. תמוך באמה באמצעות שורש כף היד וכף היד, ואפשר לזרוע להיתלות קדימה מהגוף. ישר את שרולית הזרוע כך שציר המרפק יימצא בקו אחד עם האפיקונדיל הצדי ורפידת העור תימצא מעל האקרומיון. כרוך את שרולית הזרוע סביב הזרוע והקפד שתהיה חפיפה של 2.5 ס"מ - 3.8 ס"מ בין המעטפת הקשיחה לריפוד. ניתן לחתוך את המעטפת הקשיחה ולהתאימה לגפה שהיקפה קטן יותר. לבסוף, סגור את הרצועות וודא שהן מהודקות בנוחות. חשוב: אל תהדק יתר על המידה.

בדוק את זרימת הדם בחלק המרוחק של היד במרווחי זמן קבועים.

2) הרם את חלק האמה של המייצב והכנס את שורש כף היד וכף היד לתוך השרולית כמוצג בתרשים. האגודל צריך להישען בנוחות סביב מוט האחיזה של כף היד. הדק את הרצועה בשורש כף היד.

[Comment GM1] במקור: עור כבש – נראה מיותר לכן השמטנו

3) חבר את רצועת הכתף מרפידת האקרומיון שבכתף למוט האחיזה של כף היד, כמוצג בתרשים. מקם את רפידת הצוואר בצורה נוחה על העורף.

4) מצורפת משקולת במשקל 0.9 ק"ג היוצרת מתיחה קלה של העצם במהלך ההחלמה. אין חובה להשתמש במשקולת, והדבר נתון לחלוטין לשיקול דעתו של הרופא המטפל. ליישום המשקולת, כרוך אותה סביב האמה מיד ליד המרפק, בכיוון המרוחק מהמרפק, כמוצג בתרשים.

הערה: ניתן לחתוך את המשקולת במרכזה ולהפחית את משקלה בחצי.

הוראות שבירה

5) לאחר שהשבר החלים חלקית והוא יציב, ניתן לחלק את המייצב לעצם הזרוע ולהשאיר רק את החלק של שרולית הזרוע.

6) מצא את הסימון הנמצא אנכית על המתכת, ממש ליד חיבור ציר המרפק. ייצב את השרולית העליונה כנגד משטח מוצק, וכופף את המוט במקום הסימון. לאחר כיפוף המוט מספר פעמים, הוא יישבר במקום הסימון.

הערה: לאחר שבירת המוט מומלץ לשייף את הקצוות החדים באזור השבירה כדי למנוע פציעה. חתוך במספריים את החלק העליון של שרולית הכתף והסר אותה, כמוצג בתרשים.

שימוש וניקוי

• את ריפוד השרולית ורפידת העור ניתן להסיר לצורך ניקוי או החלפה.

• יש לכבס ביד את הריפודים במים עם סבון כביסה עדין ולייבש באוויר.

לפני עריכת שינויים במייצב יש להתייעץ תמיד עם הרופא או המטפל.

אזהרה: יש להשתמש במוצר זה בפיקוח של איש צוות רפואי. האביזר אינו מיועד לשימוש ציבורי ללא פיקוח. אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.

במרשם בלבד

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, אביזר זה הוא רק גורם אחד בתכנית הטיפול הכוללת שקבע איש הצוות הרפואי. אין ערבות לכך שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.

זהירות: על פי החוק הפדרלי (ארה"ב), מכירת אביזר זה מותרת רק על-ידי איש צוות רפואי מורשה או בהוראתו.