
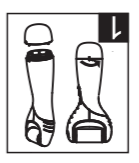
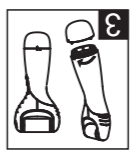
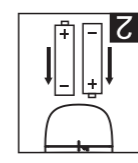


- 1. כריסטי (המכשיר)
- 2. סוללה
- 3. כיסוי/מחלקי הסוללה
- 4. כיסוי/מחלקי הסוללה
- 5. כיסוי/מחלקי הסוללה

השימוש והקלט ואיזה

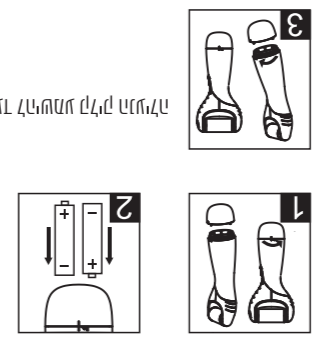

1. הכנסו את הסוללה לתא הסוללה.
 2. סגרו את כיסוי הסוללה.
 3. הכנסו את כיסוי הסוללה לתא הסוללה.
 4. סגרו את כיסוי הסוללה.

השימוש והקלט



1. יישו את המכשיר על הרגל.
 2. לחצו על כפתור ההפעלה.
 3. יישו את המכשיר על הרגל.
 4. לחצו על כפתור ההפעלה.
 5. יישו את המכשיר על הרגל.
 6. לחצו על כפתור ההפעלה.



אזהרות שימוש

- לפני השימוש הראשוני יש לעיין היטב בעלון הוראות השימוש במלואו.
- מוצר זה מיועד לשימוש על כפות הרגליים והעקבים בלבד. אין להשתמש במוצר זה על אזורים אחרים בגוף.
- מוצר זה מיועד לשימוש רק למטרות המצויינות בעלון זה. מומלץ לשמור את עלון ההוראות על מנת לאפשר עיון חוזר.
- כדי לשמור על היגיינה, גליל הפצירה מומלץ לשימוש אדם אחד בלבד.
- אין להשתמש במידה והגן חולה סכרת או סובלת מזרזמת דם חלשה באזור הרגליים.
- במידה והגן סובלת ממחלות עור יש להתייעץ עם רופא לפני השימוש.
- יש להשתמש במכשיר במשך 2-3 שניות בכל פעם. ניתן לחזור על הפעולה עד השגת התוצאה הרצויה.
- אין להשאיר את המוצר בשמש. יש לשמור במקום סגור ויבש בטמפרטורות שבין 40°-0°.

הוראות ניקוי

יש לנקות את המכשיר לאחר השימוש בו. ניתן לשתוף את גליל הפצירה במים. מכשיר הפדיקור אינו עמיד למים, אין להניס את המכשיר במלואו לתוך מים.

1. כבה/י את המכשיר
2. הסר/י את כיסוי המגן וגליל הפצירה ממכשיר הפדיקור. לאחר מכן ניתן לשתוף את גליל הפצירה במים זורמים ולנקות בעזרת המברשת לניקיון מיטבי.
3. יש לשתוף את גליל הפצירה מתחת למים זורמים בשנית ולייבש עם מגבת.
4. לבסוף יש להחזיר את גליל הפצירה למקומו.

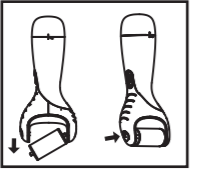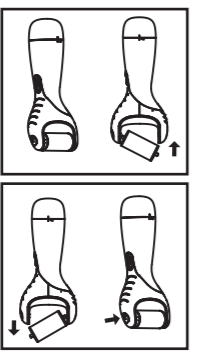


1. יישו את המכשיר על הרגל.
 2. לחצו על כפתור ההפעלה.
 3. יישו את המכשיר על הרגל.
 4. לחצו על כפתור ההפעלה.
 5. יישו את המכשיר על הרגל.
 6. לחצו על כפתור ההפעלה.

1. יישו את המכשיר על הרגל.
 2. לחצו על כפתור ההפעלה.
 3. יישו את המכשיר על הרגל.
 4. לחצו על כפתור ההפעלה.
 5. יישו את המכשיר על הרגל.
 6. לחצו על כפתור ההפעלה.

השימוש והקלט

השימוש והקלט



DYN Diagnostics

יבואן: דין דיאגנוסטיקה בע"מ, האשל 7 פארק תעשייה קיסריה
 שם הספק: ACEWIN ארץ ייצור: סין שירות לקוחות: 1-800-333-636





Battery Operated

הוראות שימוש

1. יישו את המכשיר על הרגל.
 2. לחצו על כפתור ההפעלה.
 3. יישו את המכשיר על הרגל.
 4. לחצו על כפתור ההפעלה.
 5. יישו את המכשיר על הרגל.
 6. לחצו על כפתור ההפעלה.

מכשיר פדיקור לרגליים



IFU_Pedicure_HEB_2017_01