



לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

הפרופיל של המשתמש המיועד

המשתמש חייב להיות מסוגל:

- לקרוא ולהבין את ההוראות, האזהרות ואמצעי הזהירות.

שימוש מיועד/התוויות

תומך גמיש לשורש כף היד, עם פס אלומיניום תומך גמיש לכף היד, ורצועת לחץ נשלפת

תכונות

- פס אלומיניום גמיש תומך נשלף לכף היד, לייצוב שורש כף היד
- רצועה ניידת לכוונון רמת הלחץ
- סריג בעל התאמה תלת-ממדית לקווי המתאר האנטומיים מספק לחץ נוח ואחיד
- חומר נושם

התוויות

- דלקת כרונית, לאחר טראומה או לאחר ניתוח של המפרק ו/או הרקמה הרכה בשורש כף היד
- נקעים של שורש כף היד
- דלקת גיד בשורש כף היד (טנוסינוביטיס)
- דלקת מפרקים ניוונית קלה
- כאב שגרונני בשורש כף היד (ארתרלגיה)
- תסמונת התעלה הקרפלית

התוויות נגד

- יש להשתמש בתומך לשורש כף היד רק לאחר התייעצות עם איש צוות רפואי, עם הופעת התסמינים הבאים:
- מחלות עור ופגיעות בעור באזור הנגוע (לדוגמה, שינויים בעור עקב אלרגיה, גירויים, צלקות עם נפיחות, אדמומיות, היפרתרמיה)
- הפרעות לימפתיות, נפיחות בלתי מובחנת ברקמה הרכה באזור הפגוע
- הפרעות במחזור הדם או הפרעות תחושה באזור הפגוע

אזהרות

אם מופיעים במהלך השימוש במוצר זה כאב, נפיחות, שינויי תחושה או תגובות חריגות אחרות, יש לפנות מיד לרופא.

הוראות יישום

1. בחר תומך ליד שמאל או ימין, בהתאם ליד הבעייתית.
 2. משוך והלבש את התומך מעל כף היד ושורש כף היד, תוך הכנסת האגודל לפתח שבצד.
 3. המיקום נכון כאשר החור של כרית הסיליקון ממוקם בחלק הפנימי של התומך, ומכסה את הזיז בחלק הצדי (החיצוני) של שורש כף היד.
 4. את פס האלומיניום הנשלף לכף היד ניתן לכופף בזהירות ולהתאים לצרכים האישיים.
 5. במידת הצורך, חבר את הרצועה הנשלפת לחתיכת בד הוולור הקטנה הנמצאת בחלק הפנימי של התומך וכרוך אותה סביב שורש כף היד. הרצועה מספקת תוספת לחץ כאשר השרירים מכווצים. כוונן אותה בהתאם לצרכיך. הימנע מהידוק מוגזם של הרצועה. אם אתה חש שהלחץ מוגזם, שחרר אותה מיד.
- המלצה: בעת שימוש ברצועה נשלפת יש להימנע ממגע ישיר בין הצמדן של הרצועה לבין התומך הסרוג, מכיוון שמגע כזה יפגע במראה של הסריג.
6. כאשר אינך זקוק עוד לפס האלומיניום לשם ייצוב, ניתן להוציאו. כדי להוציא את הפס, אחוז בקצה העליון של התומך ומשך בעדינות את פס האלומיניום מתוך הכיס שבו הוא נתון.

הוראות שימוש

- אסור להניח את התומך ישירות על העור אם יש עליו פצעים, לחות, שמנים, קרמים, גלים או שיירים דומים.
- אין לעטות את התומך במשך יותר מ-8 שעות ביממה.
- בשימוש נכון והקפדה על כל ההוראות לא אמורות להופיע נקודות לחץ.
- היצרן לא יישא באחריות לכל שינוי במוצר או לשימוש לא נכון.

הוראות ניקוי

- יש לכבס ביד במים קרים (30°C) עם סבון כביסה עדין.
- יש לייבש באוויר (אין להניח על רדיאטור/תנור חימום או על מקור חום אחר)
- אין להשתמש במלבין או בכלור. אין לגהץ.

הרכב

- סריג: פוליאמיד, אלסטין, פוליאסטר, גומי לטקס טבעי
- כרית: סיליקון
- כיסוי פנימי: אריג מגבת
- רצועה: פוליאמיד
- פס מתכת: אלומיניום

זהירות: מוצר זה מכיל גומי לטקס טבעי העלול לגרום לתגובות אלרגיות.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.