


## مشد IROM Elbow

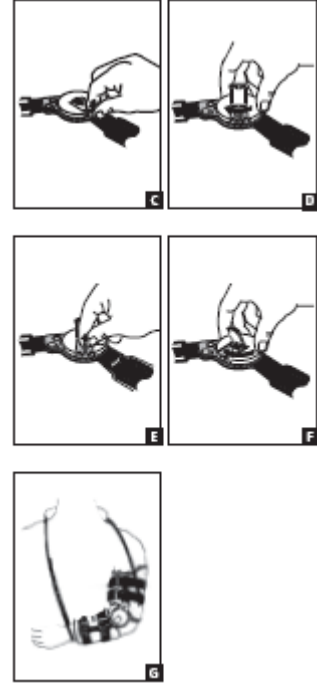

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتعمن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

**دواعي الاستعمال:** بعد العملية الجراحية في الأربطة

- الإلتواءات الزندية / الرباط الصليبي الشعاعي • التبديل الزندي/العصبي الشعاعي • إعادة البناء الزندية / الرباط الصليبي الشعاعي
  - التهاب اللقيمة الجانبية/الوسطى • تثبيت الكسور المستقرة في اللقيمة البعيدة • تثبيت الكسور المستقرة من العضد البعيد.
- لقد تم تصميم هذا المنتج لتكملة مجموعة من العلاجات الطبية الشائعة للألام المذكورة أعلاه. يجب تحديد تكرار ومدة الاستخدام من خلال وصفها من قبل أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

**موانع الاستعمال:** لا يوجد

**معلومات حول الاستعمال:**

- افتح جميع الأحزمة وانزع المربع لسنادة الضغط. استخدم المشد، باستخدام قضيب العلاقة مباشرة فوق اللقيمة الجانبية.
- ملاحظة:** قد تشد جميع الأحزمة بمقصد وفقاً لما هو مطلوب. عند استخدامه من أجل اللقيمت الجانبية أو الوسطى، ضع مربع السنادة المضغوطة في المكان المطلوب.
- ابدأ بربط الأحزمة الأقرب إلى الكوع باستخدام أداة تعديل الضغط. ثم، شد الأحزمة في الأطراف العلوية والسفلية للمشد.
- اضغط للأسفل، أخرجه، وارفعها للأعلى نحو العلاقة وثبته المزلاج. (الشكل ج)
- أدر الغطاء البلاستيكي الظاهر حتى ينكشف مسمار الانتشاء والتمدد المطلوب. (الشكل د)
- قم بزيادة الضغط على المسمار بتحريك العلاقة قليلاً.
- انزع المسمار المحدد واستبدله في وضع الدرجة المطلوب. الآن، كرر هذا للحصول على تعديل درجة الانتشاء. (الشكل هـ)
- أدر ثبات المزلاج بعد الدبوس واستبدل المزلاج. (الشكل و)
- اربط مادة الحلقة في طرف واحد من حزام الكتف إلى أحزمة كفة العضد كما هو مبين. لف الطرف الآخر حول الرسغ وعتله للحصول على أقصى قدر من الراحة. (الشكل ز) **الاستعمال والعناية:**

- قد يتم نزع البطانات وتغسل في ماء بارد وصابون لطيف. نشفها في الهواء.
- اربط البطانات إلى الجهة الداخلية من الصدقات البلاستيكية عند تجفيفها كلياً.

**لاستخدام مريض واحد فقط.**

**RX فقط**

**كفالة:** بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الذي يعرضه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

تحذير: يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) يحدد بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.