


IROM Elbow

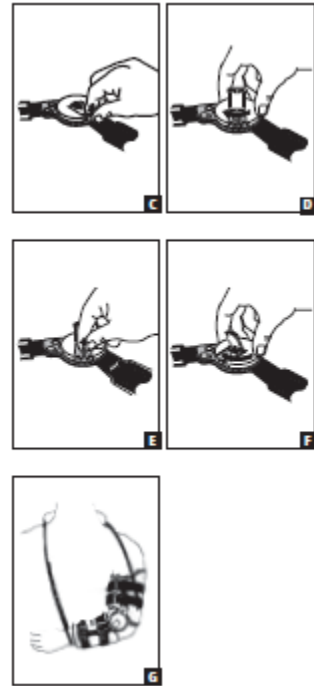

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

התוויות: לאחר ניתוחים ברצועות

• נקעים של הרצועה הקולטרלית האולנרית/הרדיאלית • שיכול של העצב האולנרי/הרדיאלי • ניתוח שיקום של הרצועה הקולטרלית האולנרית/הרדיאלית • דלקת באפיקונדיל הצדי/האמצעי • שברים יציבים בחלק המרוחק של האפיקונדיל • שברים יציבים בחלק המרוחק של עצם הזרוע.

מוצר זה תוכנן כהשלמה למגוון הטיפולים הרפואיים השכיחים, המיועדים לטיפול במכאובים כמו אלה המתוארים לעיל. איש הצוות הרפואי שרשם לך את המוצר יקבע את תדירות ומשך השימוש.

התוויות נגד: אין

הוראות יישום:

א. פתח את כל הרצועות והוצא את הרפידה המרובעת מלבד למניעת לחץ.

הנח את הסד ומקם את זרוע הציר היישר מעל לאפיקונדיל הצדי.

הערה: במקרה הצורך ניתן לגזור ולהתאים את חלקי הפלסטיק הקשיחים. אם הסד משמש לטיפול בדלקת באפיקונדיל הצדי או האמצעי, יש להניח את הרפידה המרובעת מלבד למניעת לחץ במיקום הרצוי.

ב. התחל להדק את הרצועות מהרצועה הקרובה ביותר למרפק. ודא שהלחץ יהיה בינוני. לאחר מכן הדק את הרצועות שבקצוות העליון והתחתון של הסד.

ג. לחץ את בריח הביטחון של הציר כלפי מטה, החלק אותו החוצה והרם אותו. (תרשים ג')

ד. סובב את כיסוי הפלסטיק השקוף עד חשיפת פין הכיפוף או היישור הרצוי. (תרשים ד')

ה. הנע קצת את הציר כדי לשחרר את המתח מעל הפין.

הוצא את הפין והכנס אותו למיקום המתאים, בהתאם לדרגת הכוונון הרצויה של האקסטנציה. חזור על הפעולות וכוונן את זווית הכיפוף. (תרשים ה')

ו. סובב את בריח הביטחון כך שיעבור את הפין, וסגור חזרה את הבריח. (תרשים ו')

ז. חבר את הקרס הנמצא בקצה אחד של רצועת הכתף לרצועות של שרולית הזרוע, כמוצג בתרשים. כרוך את הקצה השני סביב שורש כף היד וכוונן את הרצועה עד השגת נוחות מרבית. (תרשים ז')

שימוש וניקוי:

- את הריפודים יש להוציא ולכבס במים עם סבון כביסה עדין. יש לייבש באוויר.
- לאחר שהריפודים יבשים לחלוטין, חבר אותם לחלק הפנימי של חלקי הפלסטיק הקשיחים.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.

במרשם בלבד

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, אביזר זה הוא רק גורם אחד בתכנית הטיפול הכוללת שקבע איש הצוות הרפואי. אין ערבות לכך שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.

זהירות: על פי החוק הפדרלי (ארה"ב), מכירת אביזר זה מותרת רק על-ידי איש צוות רפואי מורשה או בהוראתו.