

حمالة IMMO

المثبتة للاكتاف



قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

- الصدمة في الطرف العلوي. الأعصاب: الشلل، والشلل النصفي.

موانع الاستعمال

- لا توجد

تحذير واحتياطات

إذا ظهر ألم، تورم، تغيرات في الإحساس أو ردود فعل غير عادية أخرى أثناء استخدام هذا المنتج، عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

تعليمات الاستخدام

- (1) ضع الساعد في حمالة الذراع، بحيث تكون البطاقة مواجهة للخارج والأحزمة متجهة للأعلى.
- (2) مرر الأحزمة فوق الأكتاف.
- (3) اجعل الأحزمة متقاطعة فوق الظهر.
- (4) احضر الأحزمة من الخلف للأمام، ممرًا إياها تحت حمالة الذراع. اربط الأحزمة مع حمالة الظهر، مستخدمًا عروات سدادات الاتصال.
- (5) لتثبيت الذراع مقابل الجسم، اربط الضمادة بحمالة الذراع ولفها حول الصدر.

العناية

تغسل يدويًا في ماء بارد. لا تستعمل مواد التبييض. لا تنظفها بالتنظيف الجاف. الكي ممنوع.

التركيب

61% بولي أميد - 30% قطن - 5% بوليستر - 4% فايبران

بدون لاتكس



مخصص للاستخدام على مريض واحد فقط

باطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.