

# IMMO



מתלה כתף

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

## שימוש מיועד/התוויות

- טראומה לגפה העליונה. נירולוגיה: שיתוק, המיפלגיה.

## התוויות נגד

- אין

## אזהרות

אם מופיעים במהלך השימוש במוצר זה כאב, נפיחות, שינויי תחושה או תגובות חריגות אחרות, יש לפנות מיד לרופא.

## הוראות יישום

(1) הנח את האמה במתלה היד, כאשר התווית פונה כלפי חוץ והרצועות פונות כלפי מעלה.

- (2) העבר את הרצועות מעבר לכתפיים.
- (3) הצלב את הרצועות על הגב.
- (4) העבר את הרצועות חזרה קדימה, והעבר אותן תחת מתלה היד. חבר את הרצועות למתלה היד באמצעות לשוניות הצמדן.
- (5) כדי לקבע את היד על הגוף, חבר את העטיפה למתלה היד וכרוך אותה סביב בית החזה.

#### **הוראות ניקוי**

יש לכבס במים קרים. אין להשתמש בחומר מלבין. אין לנקות בניקוי יבש. אין לגהץ.

#### **הרכב**

61% פוליאמיד - 30% כותנה - 5% פוליאסטר - 4% פיברן

נטול לטקס

#### **מיועד לשימוש של מטופל יחיד**

**אחריות:** חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.  
לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.