
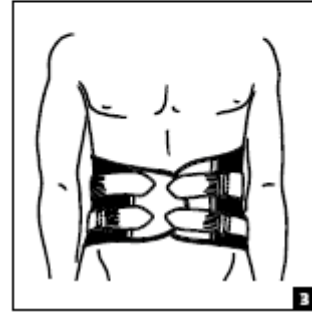
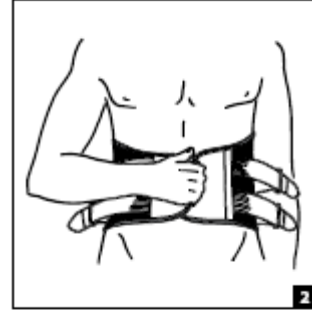


Immolomb II

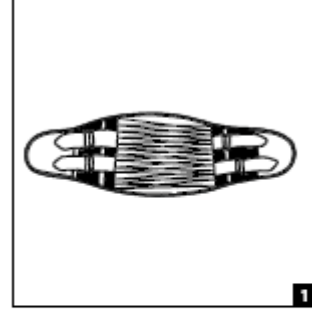

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

نوع المنتج

دعم قطني عجزى مع أحزمة شد.

المميزات

- دعامة مطاطية قطنية مع 4 أحزمة شد قطنية مرنة وحزامي شد للبطن.
- أحزمة ثنائية مزدوجة من أجل دعم إضافي

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

لعلاج ألم حاد أو مزمن في أسفل الظهر

موانع الاستعمال

لا توجد

تحذير: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.

تعليمات الاستخدام

من أجل أكبر نجاعة ممكنة، تأكد من اختيار المقاس المناسب وعدل الأحزمة من أجل الحصول على الضغط المطلوب.

- (1) افتح الأحزمة الأربعة.
- (2) ضع الدعامة حول الخصر وأغلقها باستخدام إغلاق التلامس.
- (3) اسحب الأحزمة حتى الحصول على مستوى الضغط المطلوب وأصقها على الجزء الأمامي من الدعامة، باستخدام لصاقات إغلاق التلامس.

تعليمات العناية تغسل يدويًا في ماء بارد مع صابون لطيف ويجفف بالهواء. نشفها في الهواء. لا تغسله جافًا أو تستعمل معه المبيض.

تحذير - يحتوي هذا المنتج على لاتكس. لاستخدام مريض واحد فقط.

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.