
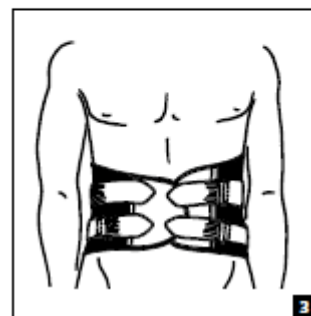
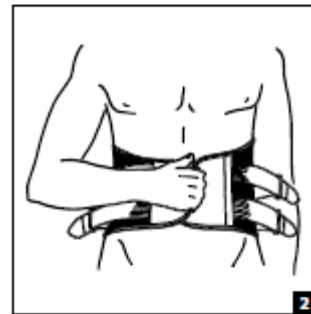


Immolomb II

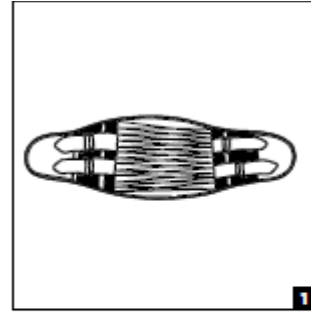

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

סוג המוצר

חגורה עם מיתרים, לאזור המותן והעצה.

תכונות

- תמיכה גמישה במותן עם 4 רצועות מותניות גמישות ושתי רצועות בטניות.
- רצועות דו-צדדיות כפולות המעניקות תמיכה נוספת

שימוש מיועד/התוויות

טיפול בכאבי גב תחתון חריפים או כרוניים.

התוויות נגד

אין

אזהרה: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

הוראות יישום

להשגת התועלת המרבית יש לבחור בקפידה את המידה המתאימה ולכוון את הרצועות למידת הלחץ הרצויה. (1) פתח את ארבע הרצועות.

2) מקם את החגורה סביב המותניים וסגור באמצעות הצמדן.

3) משוך את הרצועות עד שתשיג את רמת הלחץ הרצויה, והצמד אותן על קדמת החגורה באמצעות לשוניות הצמדן.

הוראות ניקוי יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר. אין לכבס במכונת כביסה או להשתמש בחומר מלבין.

אזהרה - מוצר זה מכיל לטקס.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח השימוש במוצר זה ימנע פגיעה.