


## دعامة Immostrap™

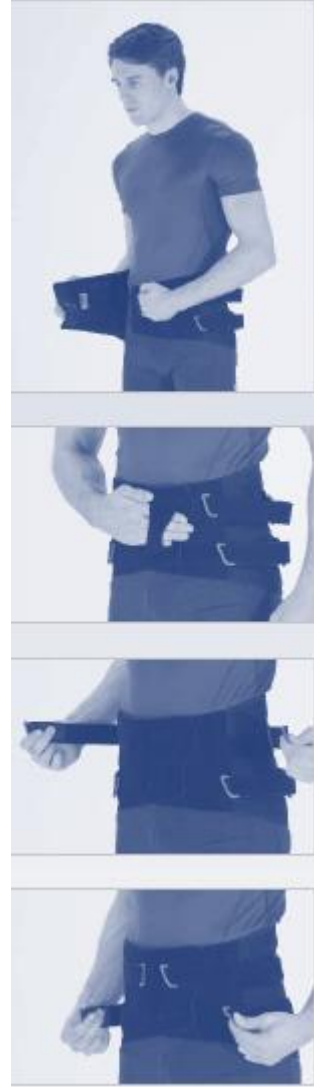

حزام دعم لأسفل الظهر

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتعمن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

### هدف الاستعمال/دلالات الاستعمال

- علاج لآلام أسفل الظهر الحادة أو المزمنة، فُصال منطقة أسفل الظهر.

### موانع الاستعمال

- لا توجد

### تحذير واحتياطات

المنتج معدّ لاستخدام مريض واحد فقط. إذا ظهر ألم، تورم، تغيرات في الإحساس أو ردود فعل غير عادية أخرى أثناء استخدام هذا المنتج، عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

### تعليمات الاستخدام

من أجل أكبر نجاعة ممكنة، تأكد من اختيار المقاس المناسب وعدّل الأحزمة من أجل الحصول على الضغط المطلوب.

- (1) افتح الأحزمة الأربعة.
- (2) ضع الدعامة حول الخصر وأغلقها باستخدام إغلاق التلامس.
- (3) اسحب الأحزمة حتى الحصول على مستوى الضغط المطلوب وأصقها على الجزء الأمامي من الدعامة، باستخدام لصاقات إغلاق التلامس.

### العناية

اغسله في مياه فاترة مع مادة منظفة خفيفة. لا تستعمل مواد التبييض. اشطفها جيداً. نشفها في الهواء. لا تجففه في النشافة. لا تنظفه بالتنظيف الجاف. الكي ممنوع.

#### التركيب

بولي أميد، بوليستر، بوليفينيل كلوريد (PVC)، مطاط، إيلاستين، فولاذ

تحذير: يحتوي هذا المنتج على لاتكس من المطاط الطبيعي الذي قد يسبب ردود فعل حساسية.



مخصص للاستخدام على مريض واحد فقط

كفالة باطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: بينما تم بذل كل الجهود في مجال التقنيات الفنية للحصول على أقصى قدر من التطابق الوظيفي والقوة والمتانة والراحة، وليس هناك ما يضمن أن استخدام هذا المنتج سيمنع الإصابة.