


Immostrap™

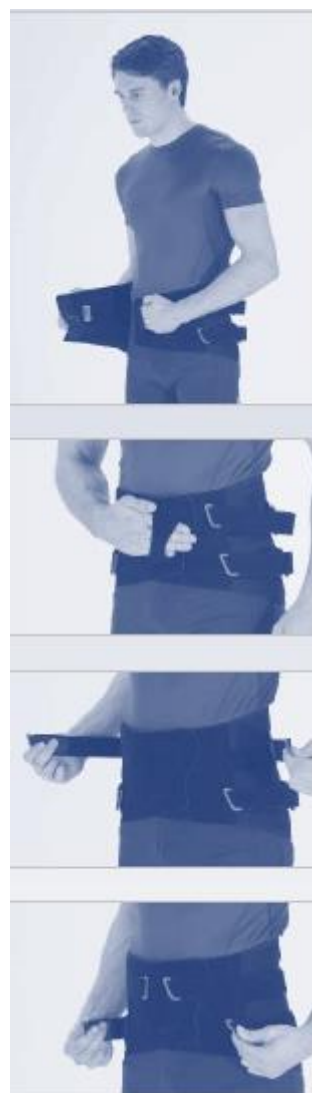

חגורת גב

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות

- טיפול בכאבי גב תחתון חריפים או כרוניים ובמחלת מפרקים ניוונית של מפרקי החוליות.

התוויות נגד

- אין

אזהרות

המוצר מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד. אם מופיעים במהלך השימוש במוצר זה כאב, נפיחות, שינויי תחושה או תגובות חריגות אחרות, יש לפנות מיד לרופא.

הוראות יישום

להשגת התועלת המרבית יש לבחור בקפידה את המידה המתאימה ולכוון את הרצועות למידת הלחץ הרצויה.

(1) פתח את ארבע הרצועות.

(2) מקם את החגורה סביב המותניים וסגור באמצעות הצמדן.

3) משוך את הרצועות עד שתשיג את רמת הלחץ הרצויה, והצמד אותן על קדמת החגורה באמצעות לשוניות הצמדן.

הוראות ניקוי

יש לכבס במים פושרים עם סבון כביסה עדין. אין להשתמש בחומר מלבין. יש לשטוף היטב. יש לייבש באוויר. אין לייבש במייבש כביסה. אין לנקות בניקוי יבש. אין לגהץ.

הרכב

פוליאמיד, פוליאסטר, PVC, גומי, אלסטן, פלדה

זהירות: מוצר זה מכיל גומי לטקס טבעי העלול לגרום לתגובות אלרגיות.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.