


Infrapatellar Band

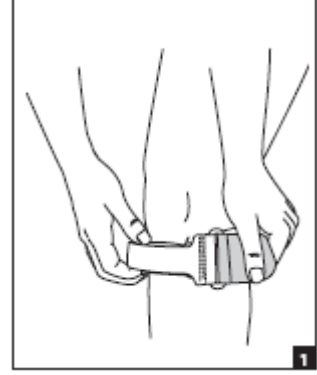

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبغناية. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم. هدف الاستعمال/دلالتل الاستعمال

لألم فخذي رضفي

موانع الاستعمال: غير متوفرة

تحذيرات واحتياطات: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك.

لا تلبس الدعامة أبدًا فوق جرح مفتوح.

معلومات حول الاستعمال:

1. فكّ الحزام وأربطه بشكل غير مشدود حول الساق. ينبغي أن تكون الخلية الهوائية ممركة تحت الرضفة (عظمة الركبة).
2. ضع الوسادة الاسفنجية في المركز خلف الركبة.
3. شدّ الحزام لمستوى حازم ومريح. لا تشدّ الحزام أكثر مما يجب.

تعليمات التنظيف:

يمكن غسلها بمياه دافئة باستخدام صابون خفيف. نشفها في الهواء.

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع. بدون لاتكس

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.