


STRAPPING ELASTIC KNEE ضمادة الركبة

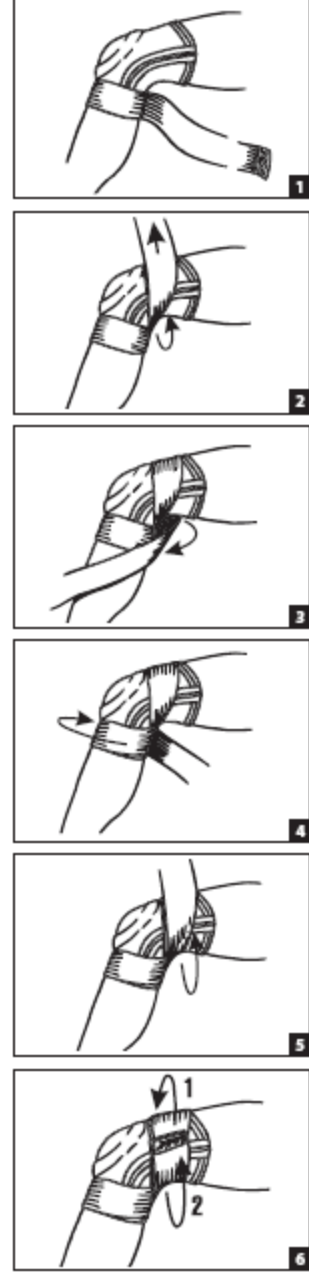

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل ويتمن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.
هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

منع أو التخفيف من خلع الرضفة. التهابات الرضفة. إصابات الغضروف المفصلي الخفيفة.
موانع الاستعمال/الاحتياطات:

ننصح بأن تطلب من مهني القيام بأول استعمال.

تعليمات الاستخدام:

اسحب مشد الركبة المطاطي فوق الركبة.

1) شكّل الحلقة مع الضمادة، وضعها على قوس الركبة، واغلقها على بطة الساق.

- إذا كنت ترغب بتقوية الأربطة الداخلية، اسحب الضمادة نحو الداخل.

- إذا كنت ترغب بتقوية الأربطة الخارجية، اسحب الضمادة نحو الخارج.

2) لف الضمادة فوق الفخذ، رافعاً الضمادة لتشدّها.

3) لف الضمادة تحت الفخذ.

- (4) لفها حول الساق، تحت الرضفة.
- (5) ثم فوق الفخذ مرة أخرى.
- (6) أحضر الضمادة للخلف تحت الفخذ واربطها بشريط ذاتي الالتصاق / الفيلكرو للضمادة نفسها.
ينبغي وصل اللاصقة ذاتية الالتصاق / الفيلكرو بالضمادة. إذا كانت مقلوبة، فك الضمادة، اعكسها وابدأ من جديد.

تعليمات العناية:

- اغسلها بمياه باردة
- لا تستعمل مواد التبييض
- لا تنظفها بالتنظيف الجاف
- الكي ممنوع
- لاستخدام مريض واحد فقط.

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.