


Donjoy® Compression Back Brace

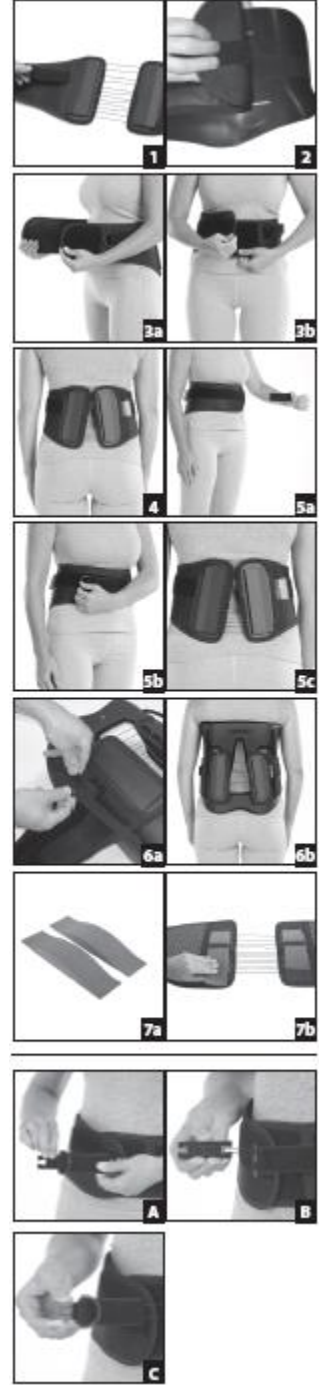

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل ويتمعن. الاستخدام الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم. هدف الاستخدام/دلائل الاستعمال: لألم حاد ومزمن في أسفل الظهر، لدعم بعد عملية جراحية، لألم بأسفل الظهر مرتبط بالنشاط، لانفتاق القرص.

موانع الاستخدام: الحمل وجريان الدورة الدموية، والظروف الرئوية أو الخاصة بالقلب والأوعية الدموية أو الهيكلية التي لها تؤدي إلى حدوث خطر أسوأ نتيجة للإجهاد و/أو الضغط. **تحذيرات واحتياطات:** إذا عانيت من أي ألم أو تورم أو تغييرات بالإحساس أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك. إذا لاحظت أي مرض جلدي أو تدهور الأربطة، توقف عن استخدامها. **معلومات حول الاستعمال:**

(1) ضع مسكة الشد وثبتها أقرب ما يمكن إلى لوحات الضغط ومدّ الحبل بالكامل. (الشكل 1)

- (2) تثبت بإحكام اللوحة الأمامية بالدعامة بواسطة حزام الأبريزم الذي على اللوحة بحلقة الحزام المتناظر داخل الدعامة. ينبغي أن تمتد اللوحة حوالي 13 سم بعد نهاية الدعامة من أجل توافق مناسب. (الشكل 2)
- (3) بالرجوع إلى الملصق المرفق لتكثيف المشدين المناسب، ضع المشد حول الخصر، واربطه. سيكون مقبض السحب على الجانب الأيسر. ستكون البطانة اللينة على الجسم. (الشكل a3 والشكل b3)
- (4) من أجل توافق وضغط مناسب، مركز العمود الفقري بين اللوحتين الجانبيتين اثنتين وضعها بشكل متناظر على الخصر. (الشكل 4)
- (5) لتطبيق الضغط، امسك مقبض السحب واسحب إلى اليمين. بعد الحصول على مستوى الضغط المطلوب، تثبت مسكة الشد على حزام التلامس على جانب اللوحة. (الشكل a5، الشكل b5 والشكل c5)
- (6) **وصل الدعامة بالإطار الصلب (Chairback)**
- ضع مسكة الشد وثبتها أقرب ما يمكن إلى لوحات الضغط ومدّ الحبل بالكامل. (الشكل 1)
 - افتح الأحزمة على جوانب الإطار الصلب. ضع الدعامة حول الإطار الصلب ومركزها. أربط الأحزمة على الإطار الصلب لتثبيت الدعامة. (الشكل a6)
 - ضع التركيب دعامة/إطار حول الخصر، كرر الخطوات 3-4 أعلاه. (الشكل b6)
- (7) **استعمال الحشوات الإسفنجية القصبية**
- أدخل الحشوة الملائمة (7، 10 أو 12 درجة) لداخل الجيوب المرنة الموجودة داخل الألواح الجانبية. قم بضبط الراحة المناسبة. (الشكل a7 والشكل b7)
- تعليمات للحد من طول لسان السحب**
- (A) ثني VelcroR للخلف على مقبض السحب معارضًا للسان، انزع المدخل البلاستيك من جيب لسان السحب.
- (B) لف الطول الزائد من حزام الشد حول المدخل البلاستيك حسب الحاجة
- (C) استبدل الدرج البلاستيكي الموجود خلف جيب لسان السحب
- يغسل يدويًا في ماء بارد مع صابون لطيف. نشفها في الهواء. ملاحظة: إذا لم يشطف جيدًا، قد يسبب الصابون المتبقي التهيج وتلف المواد.
- لاستخدام مريض واحد فقط.**
- كفالة:** بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الذي يعرضه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

تحذير: يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) يحدد بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.