

חגורת גב Donjoy®



לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות: כאבי גב תחתון חריפים וכרוניים, תמיכה לאחר ניתוח, כאבי גב תחתון הקשורים לפעילות, וכן בלט דיסק.

התוויות נגד: היריון ובעיות בזרימת הדם, בריאות, בלב ובכלי הדם או בשלד העלולות להחמיר כתוצאה מדחיסה ו/או לחץ.

אזהרות: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש צוות רפואי. במקרה של שחיקה או קרעים במיתרים, יש להפסיק להשתמש בחגורה.

הוראות יישום:

(1) מקם את ידית המשיכה והדק אותה קרוב ככל האפשר לפנלים המספקים לחץ, ומתח את המיתר למלוא אורכו. (תרשים 1)

(2) הדק את הפנל הקדמי לחגורת הגב באמצעות הצמדת רצועת הצמדת הנמצאת על הפנל, לרצועת הלולאה המתאימה הנמצאת בצד הפנימי של חגורת הגב. כדי להשיג התאמה נכונה, הפנל אמור להשתרע בערך 13 ס"מ מעבר לקצה חגורת הגב. (תרשים 2)

(3) עיין בתווית המצורפת וראה את הכיוון הנכון של החגורה ומיקום החגורה סביב המותניים. מקם את החגורה סביב המותניים והדק אותה. ידית המשיכה תהיה בצד שמאל. הריפוד הרך יהיה על הגוף. (תרשימים 3 א' ו-3 ב')

(4) כדי שהחגורה תתאים היטב וכדי לכוון כראוי את הלחץ, מקם את עמוד השדרה בין שני הפנלים הצדדיים ומקם את החגורה באופן סימטרי על המותניים.

(תרשים 4)

(5) כדי להפעיל לחץ, אחוז בידית המשיכה ומשוך אותה ימינה. לאחר השגת רמת הלחץ הרצויה הדק את ידית המשיכה לרצועת החיבור הנמצאת בצדו של הפנל. (תרשימים 5 א', 5 ב' ו-5 ג')

6 חיבור חגורת הגב למסגרת הקשיחה (משענת גב)

• מקם את ידית המשיכה והדק אותה קרוב ככל האפשר לפנלים המספקים לחץ, ומתח את המיתר למלוא אורכו. (תרשים 1)

• פתח את הרצועות בצדי המסגרת הקשיחה. מקם את חגורת הגב סביב המסגרת הקשיחה ומרכז אותה. סגור את הרצועות על המסגרת הקשיחה והדק את חגורת הגב. (תרשים 6 א')

• הנח על המותניים את חגורת הגב המשולבת במסגרת. חזור על שלבים 3-4 לעיל. (תרשים 6 ב')

7 שימוש בכריות הספוג בלורדוזיס

הכנס את הכרית המתאימה (7°, 10° או 12°) לכיסים הגמישים הנמצאים בחלק הפנימי של הפנלים.

התאם אותם בצורה נוחה. (תרשימים 7 א' ו-7 ב')

הוראות לקיצור לשונית המשיכה

(א) קפל את הצמדן (Velcro®) אחורה על ידית המשיכה וחשוף את הלשונית. הוצא את סוגר הפלסטיק מהכיס של הלשונית המשיכה.

(ב) כרוך את עודף רצועת המתח סביב סוגר הפלסטיק בהתאם לצורך.

(ג) החזר את אבזם הפלסטיק חזרה לכיס בלשונית המשיכה.

הוראות ניקוי: יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין. יש לייבש באוויר. הערה: יש לשטוף את האביזר היטב, אחרת שאריות הסבון עלולות לגרום לגירוי ולהתפוררות החומר.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, אביזר זה הוא רק גורם אחד בתכנית הטיפול הכוללת שקבע איש הצוות הרפואי. אין ערבות לכך שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.

זהירות: על פי החוק הפדרלי (ארה"ב), מכירת אביזר זה מותרת רק על-ידי איש צוות רפואי מורשה או בהוראתו.