


# LATERAL J PATELLA SUPPORT

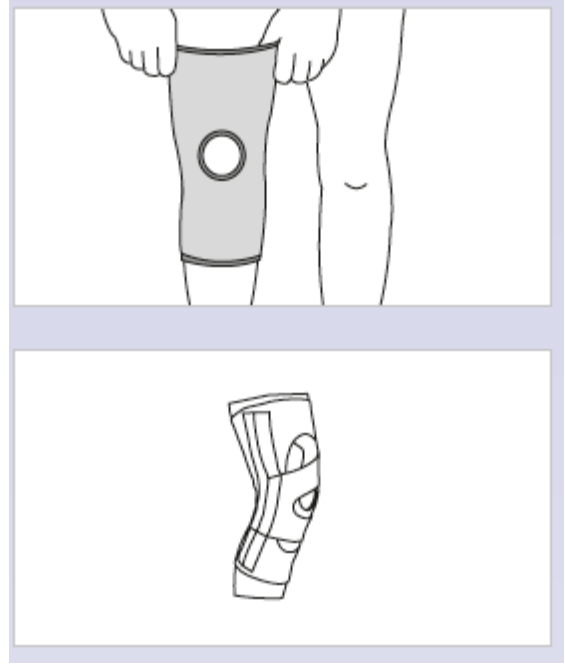

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

- دعم، دفع وانضغاط لعدم استقرار خفيف في الركبة وللألم.

موانع الاستعمال

- يجب ألا يستعمل مرضى التهاب الوريد منتجة مصنوعة من نيوبرين.

تحذير واحتياطات

ينبغي عدم استخدام دعامة مصنوعة من نيوبرين من قبل أفراد لديهم قابلية معروفة للإصابة بالتهاب الجلد أو حساسية لمنتجات مشتقة من نيوبرين. إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.

تعليمات الاستعمال

(1) أمسك حواف الكمّ من جهة الفتحة الأكبر. أدخل رجليك لداخل الكمّ، واسحب حتى يصبح على الركبة بحيث تحيط الفتحة الأمامية الرضفة.

(2) لفّ واربط حزام النيوبرين السفلي ومن ثم العلوي بالجزء الداخلي من الركبة.

العناية

اغسل باليد بمياه دافئة باستخدام صابون خفيف، واشطف جيّداً. ونشفها في الهواء.

ملاحظة: إذا لم يشطف جيّداً، قد يسبب الصابون المتبقي التهيج وتلف المواد.

غير مصنوع من لاتكس مطاط طبيعي

معدّ للاستخدام على مريض واحد

باطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.