


תמיכת J צדדית לפיקה

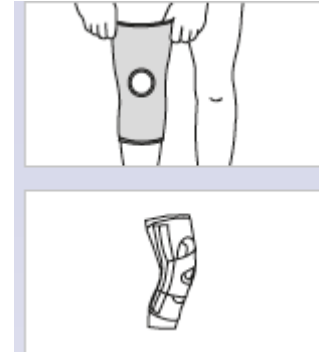

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות

• תמיכה, חום ולחץ למקרים קלים של חוסר יציבות של הברך וכאב.

התוויות נגד

• למטופלים עם דלקת ורידים אסור להשתמש באביזרים מניאופרן.

אזהרות

לאנשים עם רגישות ידועה לתוצרי לוואי של ניאופרן, אשר כתוצאה מכך מתפתחת אצלם דלקת עור או אלרגיה, אסור להשתמש בתמיכות מניאופרן. אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

הוראות יישום

- (1) אחוז בשולי הברכית, בפתח הגדול יותר. הכנס את הרגל לתוך הברכית, והרם את הברכית לברך כך שהפתח בחלקה הקדמי יקיף את הפיקה.
- (2) כרוך את רצועת הניאופרן העליונה ואחריה את התחתונה וסגור אותה בחלק הפנימי של הברך.

הוראות ניקוי

יש לכבס ביד במים פושרים עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר.

הערה: יש לשטוף את האביזר היטב, אחרת שאריות הסבון עלולות לגרום לגירוי ולהתפוררות החומר.

לא מיוצר עם גומי לטקס טבעי

מיועד לשימוש של מטופל יחיד

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.