
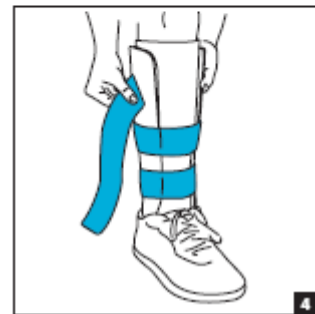
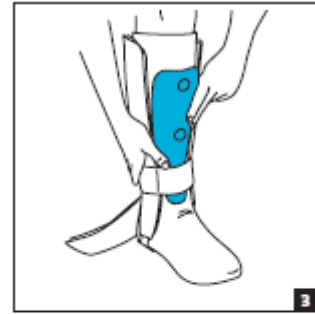
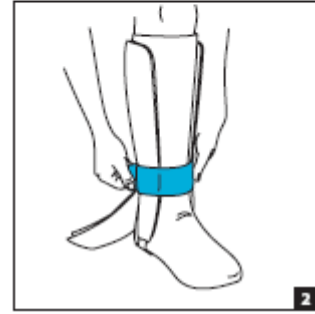


Leg Brace

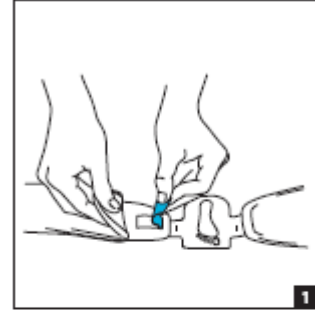

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبغناية. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلالتل الاستعمال

لقد تم تصميم دعامة الساق AirCastR من أجل تثبيت موضع الكسر وتحويل عبأ تحمل الوزن إلى الأنسجة الرخوة بأسفل الساق لإتاحة معالجة وظيفية لكسور الضغط والكسور المستقرة في أسفل الساق.
موانع الاستعمال: غير متوفرة

تحذيرات واحتياطات: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجتك.
معلومات حول الاستعمال:

1. عدّل عرض رفادة الكعب

- افتح الدعامة وارفع قاعدة الخلايا الهوائية حتى تصبح أحزمة الكعب مكشوفة كليًا.
- اخلع أحزمة الكعب وعدّل عرض رفادة الكعب لتلائم مقاسك بشكل محكم (الشكل 2).

2. اضغط بحزم على أحزمة الكعب والخلية الهوائية ليعودوا إلى مكانهم ضع الدعامة -

- البس جوربًا.
- ضع حافة رفادة الكعب المستديرة تحت الكعب.
- اجعل جوانب الدعامة بمحاذاة الكاحل.
- أغلق بإحكام الحزام السفلي (الشكل 3).

إذا كانت اللوحة الأمامية مضمولة:

3. أدخل رأس اللوحة تحت الحزام وحافتي اللوحة تحت جانبي الدعامة (الشكل 4). اربط الأحزمة بإحكام

- اربط الأحزمة المتبقية بإحكام من الأسفل للأعلى (الشكل 5).
- البس حذاء مع رباط أو حذاء رياضي

4. عدّل الدعامة

- اضغط جانبي الدعامة معًا بيد واحدة
- شدّ الأحزمة من الأسفل للأعلى باليد الأخرى.
- شدّها لدعم مريح.

تنبيه

كما هو الحال مع جميع الأجهزة المستعملة للأطراف السفلية، مثل جبيرة أو دعامة، ينبغي الإشراف على المرضى الذين بدون إحساس (مثلًا تخدير بعد عملية جراحية، اعتلال عصبي وما شابه) بشكل متكرر بحثًا عن "نقاط ساخنة"؛ تهيج الجلد أو معالجة الجروح. قم دائمًا بإرتداء جورب ماص عند استخدام دعامة الساق.

تعديل توافق دعامة الساق

الخلايا الهوائية بدعامة الساق منفوخة مسبقًا ولا تحتاج عادة أي تعديل.
إذا شعرت بقرص أو بضغط غير متساوٍ:

- غير مكان الدعامة أو
 - عدّل من جديد رفادة الكعب والأحزمة. استخدم الخطوط التي على رفادة الكعب كمرجع.
- إذا استمرت الحالة، ينبغي ضبط حجم الخلية الهوائية (كمية هواء أكبر مما يجب ستمنح دعمًا أقل):
- افتح الصمام الذي بأعلى الخلية الهوائية.
 - أدخل أنبوب النفخ لداخل الصمام 1. "
 - أخرج كمية صغيرة من الهواء من خلال الضغط بلطف على الخلية الهوائية أو
 - أضف كمية صغيرة من الهواء من خلال النفخ لداخل الأنبوب.
 - اضغط على الصمام ليصبح مسطحًا تمامًا تحت أنبوب الهواء، وأخرج الأنبوب ببطء.
 - قم بطي الصمام.

تعليمات التنظيف:

يمكن غسل دعامة الساق بكاملها باليد في مياه فاترة مع صابون معتدل وتجفيفها بالهواء.
كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.
لاستخدام مريض واحد فقط.
بدون لاتكس

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الشامل الذي يقدمه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

تنبيه: يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) يحدد بيع هذا الجهاز من قبل أو أخصائي رعاية صحية مرخص.