


מייצב קרסול

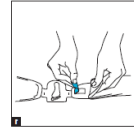

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות:

מגף AirCastR מיועד לייצב את אזור השבר ולהעביר את עומס נשיאת המשקל לרקמות הרכות של החלק התחתון של הרגל, כדי לאפשר טיפול תפקודי בשברי מאמץ ובשברים יציבים של החלק התחתון של הרגל.

התוויות נגד: לא רלוונטי

אזהרות: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

הוראות יישום:

1. כוונן רוחב רפידת העקב

- פתח את מייצב הקרסול והרם את תחתית כריות האוויר עד שרצועות העקב יהיו חשופות לחלוטין.
- הרם והסר את רצועות העקב, וכוון את רוחב רפידת העקב לרוחב נוח (תרשים 2).

- לחץ היטב את רצועת העקב וכריות האוויר למקומן.

2. הנחת מייצב הקרסול

- ראשית גרוב גרב.
- מקם את הקצה העגול של רפידת העקב מתחת לעקב.
- יישר את צדי מייצב הקרסול בקו אחד עם הקרסול.
- הדק את הרצועה התחתונה (תרשים 3).

כאשר נכלל פנל קדמי:

- החלק את קצה הפנל מתחת לרצועה התחתונה ואת קצות הפנל מתחת לצדי מייצב הקרסול (תרשים 4).

3. סגירת הרצועות

- סגור את שאר הרצועות מלמטה כלפי מעלה (תרשים 5).
- נעל נעל עם שרוכים או נעל ספורט.

4. כוונן הקרסולית

Comment [G1]: sneaker - במקור: לא נראה נכון לייצג מותג סניקר - לא נראה נכון לייצג מותג ספציפי

- לחץ ביד אחת את צדי מייצב הקרסול זה אל זה.
- בידך השנייה הדק את הרצועות מלמטה כלפי מעלה.
- הדק עד שתחוש בנוח.

זהירות

בדומה לכל אביזרי הקיבוע לגפיים התחתונות, לדוגמה, גבסים או סדים, מטופלים חסרי תחושה (כלומר, אלחוש לאחר ניתוח, נירופתיות וכדומה) צריכים להיות במעקב צמוד לאיתור אזורים בעייתיים, גירוי בעור, או לטיפול בפצעים. יש תמיד לגרוב גרב סופגת או חבישה אלסטית מתחת למייצב קרסול.

כוונן המידה של מייצב הקרסול לקרסול

כריות האוויר של מייצב הקרסול מנופחות מראש ובדרך כלל אינן דורשות כוונן.

אם אתה חש צביטות או לחץ בלתי שווה:

- מקם מחדש את מייצב הקרסול, או
- כוונן את רפידת העקב ואת הרצועות. השתמש בקווים שעל רפידת העקב כנקודת התייחסות.
- אם המצב נמשך, כוונן את נפח כרית האוויר (עודף אוויר יפחית את התמיכה):
- פתח את קיפול השסתום בראש כרית האוויר.
- החדר את צינורית הניפוח לתוך שסתום 1.
- לחץ קלות על כרית האוויר ורוקן מעט אוויר, או
- נשוף לתוך הצינורית והוסף מעט אוויר.
- לחץ על השסתום מתחת לצינורית האוויר ושטח אותו, והוצא לאט את הצינורית.
- קפל את השסתום.

הוראות ניקוי:

יש לכבס את מייצב הקרסול כולו ביד במים פושרים עם סבון כביסה עדין, ולייבש באוויר.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.

נטול לטקס

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, אביזר זה הוא רק גורם אחד בתכנית הטיפול הכוללת שקבע איש הצוות הרפואי. אין ערבות לכך שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.

זהירות: על פי החוק הפדרלי (ארה"ב), מכירת אביזר זה מותרת רק על-ידי איש צוות רפואי מורשה או בהוראתו.