


# Legend™ /4titude®/ 4titude Advance™/ Renegade™/ Armor by DonJoy™ ACL, PCL, CI Knee Brace

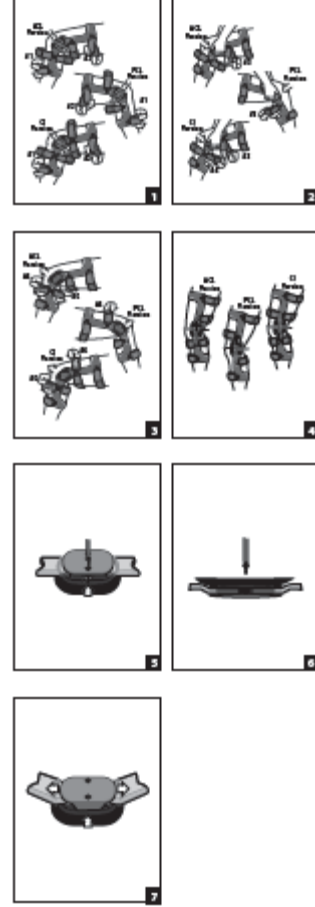

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

المستخدم المستهدف: يجب أن يكون المستخدم قادر على: قراءة وفهم التوجيهات والتحذيرات والاحتياطات.

دواعي الاستعمال: حالات العجز في الرباط الصليبي الأمامي، الرباط الصليبي الخلفي، العجز في الرباط الصليبي الأمامي/الرباط الصليبي الخلفي • عمليات إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي، الرباط الصليبي الخلفي، إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي/الرباط الصليبي الخلفي • حالات العجز في الرباط الصليبي الجانبي • حالات العجز في الرباط الصليبي الجانبي مع الرباط الصليبي الخلفي • إنتواءات الرباط الجانبي الإنسي و/أو الرباط الوحشي الجانبي • التمدد الزائد

لقد تم تصميم هذا المنتج لتكملة مجموعة من العلاجات الطبية الشائعة للالام المذكورة أعلاه. يجب تحديد تكرار ومدة الاستخدام من خلال وصفها من قبل أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

موانع الاستعمال: لا يوجد

معلومات حول الاستعمال:

1) أ: عند الجلوس على حافة الكرسي، أخطو مستخدماً المشد. اثن الركبة 45 درجة، وضع المشد كما هو مبين في الشكل 1، وثبت العلاقة في المركز حول رقم 1" (2.54سم) فوق أعلى صابونة الركبة وقليلًا بعد خط وسط الساق. تحقق من أن المشد غير ملتوٍ حول الساق.

ب: ثبت أسفل شريط بطة الساق (#1)، ثم أعلى الحزام المربوط (#2).

2) ج: حافظ على الركبة مثنية 45 درجة، وادفع كلا اللقم (العلاقات) نحو ظهر الساق، كما هو مبين في الشكل 2.

حافظ على وضع العلاقات: للحصول على نسخة ACL المعدلة ثبت الحزام المربوط السفلي (#3)، للحصول على نسخة PCL المعدلة، ثبت شريط بطة الساق العلوي (#4) على ظهر الساق.

3) هـ: للحصول على نسخة ACL المعدلة اسحب العلاقات للأمام قليلاً قبل ربط شريط قصبية الساق الأمامي (عظم الساق الأكبر) (#4). للحصول على نسخة PCL المعدلة اسحب العلاقات للأمام قليلاً قبل ربط شريط قصبية الساق الأمامي (عظم الساق الأكبر) (#5) وشريط الفخذ الأمامي (#6). لا تسحب المفصلات بعد الخط المنصف للساق

و: للحصول على نسخة ACL المعدلة القادمة، ثبت أعلى شريط بطة الساق (#5). احرص على عدم سحب هذا الحزام بقوة مما يسبب خطر الإصابة بمشاكل في الدورة الدموية.

4) ز: عندما يكتمل ربط جميع الأحزمة، يجب أن تكون العلاقات مركزة فقط فوق أعلى صابونة الركبة وقليلًا بعد الخط المنصف للساق. لضمان عدم حدوث انزلاق خلال النشاط، يوصى بالقيام بقليل من عمليات ثني الركبة أو المشي لمدة دقائق قليلة، ومن ثم إعادة شد الأحزمة متبعًا الخطوات من ب إلى و أو من ب إلى هـ للحصول على نسخة CI المعدلة.

#### تعليمات لتعديل العلاقة

يأتي المشد الخاص بك مع توقعات مثبتة تصل إلى امتداد 10 درجات. لتغيير التوقعات المثبتة، أولاً انزع البرغي تمامًا كما هو مبين (للدرع بواسطة DonJoy & Legend، الشكل 5، Legend، الشكل 5، 4Tititude Advanced & Renegade، الشكل 6). ثم انزع التوقعات. ادخل التوقعات الجديدة، حاذي مع الثقوب في حزام المفصلة، ثم أعد إدخال البرغي. مفك فيليبس مصلب، وتحقق من أن البراغي موضوعة في التجاويف ومربوطة تمامًا. يجب أن يكون كل من التوقف الوسطي والجانبى متطابقين في الدرجة.

غطاء درع العلاقات الجانبية الشرائحية (العادي أو LEGEND). لنزع توقف الامتداد، من الضروري تثبيت العلاقة وإخراج غطاء الدرع قبل نزع التوقف (الشكل 7).

توقعات الامتداد: 0 درجة، 10 درجة، 20 درجة، 30 درجة و 40 درجة.

توقعات الانتشاء: 0 درجة، 45 درجة، 60 درجة، 75 درجة و 90 درجة (لا يوجد توقعات انتشاء مثبتة على شحنة السلع)

#### الاستعمال والعناية

- إذا كان من الضروري إعادة الربط أثناء النشاط، أعد ربط جميع الأحزمة متبعًا الخطوات في تعليمات الاستعمال.
- قد يتم تشذيب جميع الأحزمة وسنادات التثبيت لتلائم مع الفروق الفردية في محيط الأطراف.
- قد يستخدم المشد في الماء العذب أو المالح. بعد الاستخدام في النشاطات المائية، جففه كليًا واشطفه بماء نظيف وماء عذب و ثم جففه في الهواء.
- اغسل بطانات وسنادات تثبيت اللقمة الخاصة بك يدويًا في ماء بارد مع مطهر لطيف.
- يجفف في الهواء فقط، لا تسخن البطانات أو سنادات تثبيت اللقمة الجافة.
- تطلب آلية العلاقة قليل من الصيانة في الوضع العادي. ومع ذلك، قد تستخدم مواد التشحيم الجافة مثل رذاذ Teflon™ للآلية الداخلية للعلاقة.
- يوصى بمواد التشحيم الجافة بعد الاستخدام في الماء.
- تفقد براغي العلاقة للربط وإعادة الشد حسب الحاجة بشكل متكرر.

استشر طبيبك أو المُعالج دائمًا قبل إجراء تغييرات بالدعامات.

تعليمات التنظيف: تغسل يدويًا في ماء بارد مع صابون لطيف. نشفها في الهواء.

#### المحتويات المادية:

الإطار - ألمنيوم

العلاقة - ألمنيوم وفولاذ

عروات الأحزمة - ألمنيوم ونابليون

مواد ناعمة - نابليون والاتييلين فينيل اسيتات

تحذير: ينبغي استعمال هذا المنتج تحت إشراف أخصائي في المجال الطبي. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام العام غير الخاضع للرقابة. إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.

كفالة: بموجب كفالة DJO، LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر وسنة واحدة على إطار المشد/العلاقات من تاريخ البيع.

لاستخدام مريض واحد فقط.

غير مصنوع من لاتكس مع مطاط طبيعي

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الذي يعرضه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.