


מייצב Legend™ /4titude®/ 4titude Advance™/ Renegade™/ Armor DonJoy™ לרצועות הברך

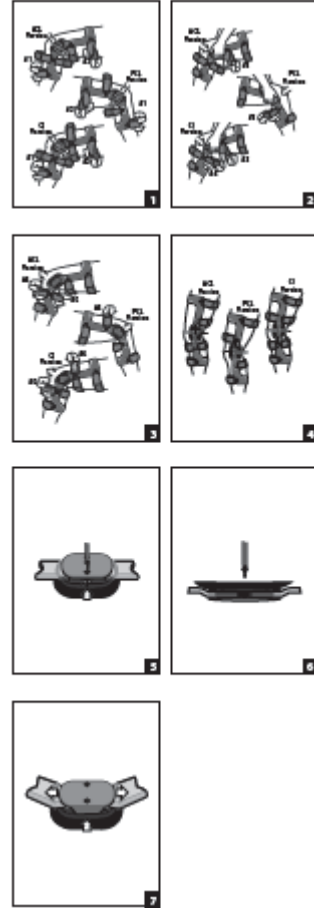

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

הפרופיל של המשתמש המיועד: המשתמש חייב להיות מסוגל: לקרוא ולהבין את ההוראות, האזהרות ואמצעי הזהירות.

- התוויות:** ליקויים ברצועה הצולבת הקדמית (ACL), ברצועה הצולבת האחורית (PCL), ברצועה הצולבת הקדמית וברצועה הצולבת האחורית (ACL/PCL) • ניתוחי שיקום של הרצועה הצולבת הקדמית (ACL), הרצועה הצולבת האחורית (PCL), הרצועה הצולבת הקדמית והרצועה הצולבת האחורית (ACL/PCL) •
- ליקויים ברצועה הקולטרלית • ליקויים ברצועה הקולטרלית עם מעורבות של הרצועה הצולבת האחורית (PCL) • נקעים של הרצועה הקולטרלית האמצעית (MCL) ו/או הרצועה הקולטרלית הצדית (LCL) •
- מתיחת יתר

מוצר זה תוכנן כהשלמה למגוון הטיפולים הרפואיים השכיחים, המיועדים לטיפול במכאובים כמו אלה המתוארים לעיל. איש הצוות הרפואי שרשם לך את המוצר יקבע את תדירות ומשך השימוש.

התוויות נגד: אין

הוראות יישום:

1) א: שב על קצה של כיסא והשחל את הרגל דרך המייצב. כופף את הברך ל-45°, מקם את המייצב כמוצג בתרשים 1, ומרפז את הציר כ-2.5 ס"מ מעל לחלק העליון של פיקת הברך וקצת מעבר לקו האמצע של הרגל. ודא שהמייצב אינו מסובב על הרגל.

ב: הדק קודם את רצועת השוק התחתונה (מס' 1) ואז את רצועת הירך העליונה (מס' 2).

2. ג: החזק את הברך בזווית של 45° ודחף את שני הזיזים (הצירים) לכיוון אחורי הרגל, כמוצג בתרשים 2.

ד: שמור על מיקום הצירים ואז: עבור הגרסה לרצועה הצולבת הקדמית (ACL) הדק את רצועת הירך התחתונה (מס' 3), עבור הגרסה לרצועה הצולבת האחורית (PCL) הדק את רצועת השוק העליונה (מס' 3), עבור הגרסה לחוסר יציבות משולבת (CI) הדק את רצועת הירך התחתונה (מס' 3) ולאחר מכן את רצועת השוק העליונה (מס' 4) שעל החלק האחורי של הרגל.

3) ה: עבור הגרסה לרצועה הצולבת הקדמית, משוך את הצירים מעט קדימה והדק את רצועת הירך הקדמית (מס' 4). עבור הגרסה לרצועה הצולבת האחורית, משוך את הצירים מעט קדימה והדק את רצועת הירך הקדמית (מס' 4). עבור הגרסה לחוסר יציבות משולבת, משוך את הצירים מעט קדימה והדק את רצועת השוק הקדמית (מס' 5) ואת רצועת הירך הקדמית (מס' 6). אל תמשוך את הצירים מעבר לקו האמצע של הרגל.

ו: עבור הגרסה לרצועה הצולבת הקדמית, הדק את רצועת השוק העליונה (מס' 5). הקפד לא למשוך ולהדק רצועה זו יתר על המידה, אחרת קיים סיכון לבעיות בזרימת הדם.

4) ז: לאחר סגירת כל הרצועות, הציר צריך להיות ממוקם בדיוק מעל החלק העליון של הפיקה וקצת מאחורי קו האמצע. כדי לוודא שהמייצב לא יחליק במהלך פעילות, מומלץ לכופף את הברך מספר פעמים או ללכת מספר דקות ואז להדק שוב את הרצועות על-פי שלבים ב'-ו', או ב'-ה' עבור הגרסה לחוסר יציבות משולבת.

הוראות לכוונון הציר

המייצב מגיע כשמותקנים בו מעצרי פישוט של 10°. כדי להחליף את המעצורים המותקנים, ראשית הוצא לחלוטין את הבורג, כמוצג (לגבי מייצב Legend™ / 4titude®/ 4titude Advance™/ Renegade™/ Armor מתוצרת DonJoy™ לרצועות הברך, תרשים 6). לאחר מכן הוצא את המעצורים. הכנס את המעצורים החדשים, הצב אותם מול החורים בלוחית הציר, והכנס חזרה את הבורג. הברג היטב את הברגים באמצעות מברג פיליפס. הזווית של המעצור האמצעי חייבת להיות זהה לזווית של המעצור הצדי.

מכסה המגן של הציר המוסט הצידה (נמצא באופן רגיל על LEGEND). כדי להוציא את מעצור הפישוט, הכרחי לכופף את הציר ולהסיט את מכסה המגן, ורק אז להוציא את המעצור (תרשים 7).

מעצורי פישוט: 0°, 10°, 20°, 30°, ו-40°.

מעצורי כיפוף: 0°, 45°, 60°, 75° ו-90° (לא מותקנים מעצורי כיפוף לפני המשלוח).

שימוש וניקוי

- אם במהלך הפעילות נחוץ הידוק מחדש של הרצועות, יש להדק מחדש את כולן על-פי השלבים המופיעים בהוראות היישום.
- ניתן לגזור את כל הרצועות והרפידות ולהתאימן להבדלים האישיים בהיקף הגפה.
- ניתן להשתמש באביזר במים מתוקים או מלוחים. לאחר השימוש בפעילויות במים, יש לנקז היטב, לשטוף במים נקיים ולייבש באוויר.
- יש לכבס את הריפוד ואת רפידות הצירים ביד, במים קרים עם סבון כביסה עדין.
- יש לייבש באוויר בלבד, אין לייבש את הריפוד או הרפידות בחום.
- בשימוש רגיל נחוצה תחזוקה מועטה של מנגנון הציר. עם זאת, אפשר ליישם על המנגנון הפנימי של הציר אבקת סיכה כמו תרסיס Teflon™. מומלץ להשתמש באבקת סיכה לאחר שימוש במים.
- יש לערוך בדיקה תקופתית של מידת ההידוק של בורגי הצירים, ולהדק אותם שוב במידת הצורך.

לפני עריכת שינויים במייצב יש להתייעץ תמיד עם הרופא או המטפל.

הוראות ניקוי: יש לכבס ביד במים (30°C) עם סבון כביסה עדין. יש לייבש באוויר.

תכולת החומרים:

מסגרת - אלומיניום

ציר - אלומיניום ופלדה

לשוניות הרצועה - אלומיניום וניילון

חומרים רכים - ניילון ואתילן ויניל אצטט (EVA)

אזהרה: יש להשתמש במוצר זה בפיקוח של איש צוות רפואי. האביזר אינו מיועד לשימוש ציבורי ללא פיקוח. אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את המוצר כולו או חלקים ממנו ואת אביזריו בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה עבור החלקים הרכים, ושנה אחת מתאריך המכירה עבור מסגרת/צירי הסד.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.

לא מיוצר עם גומי לטקס טבעי

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, אביזר זה הוא רק גורם אחד בתכנית הטיפול הכוללת שקבע איש הצוות הרפואי. אין ערבות לכך שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.