


LoPro FourcePoint Hinge

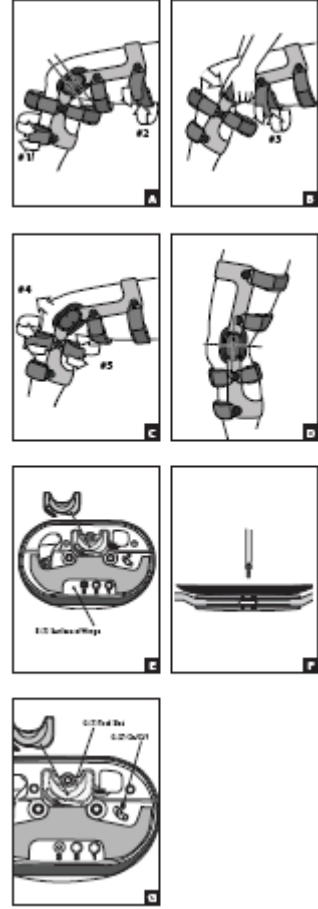

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتعمن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلالات الاستعمال: خلل بالرباط التصالبي الأمامي (ACL) • إعادة بناء الرباط التصالبي الأمامي • حالات العجز في الرباط الصليبي الجانبي • إصابة فرط التمديد • للوقاية •

لقد تم تصميم هذا المنتج لتكملة مجموعة من العلاجات الطبية الشائعة للآلام المذكورة أعلاه. يجب تحديد تكرار ومدة الاستخدام من خلال وصفها من قبل أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك. للاستخدام على مريض قد حقق تمديدًا كاملاً.

موانع الاستعمال: لا يوجد

تحذيرات واحتياطات: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك.

معلومات حول الاستعمال:

أ. عند الجلوس على حافة الكرسي، أخطو مستخدمًا المشد.

قم بثني الركبة بزاوية 45 درجة، ضع الدعامة كما هو مبين في الشكل A، بحيث تكون المفصلة في المركز بأعلى الرضفة (عظم رأس الركبة) بحيث تتجاوز قليلاً الخط الناصف من الساق. تحقق من أن المشد غير ملتوٍ حول الساق.

ثبت حزام بطة الساق السفلي (الحزام رقم #1)، ثم حزام الفخذ العلوي (الحزام رقم #2).

B. من خلال الحفاظ على الركبة مثنية بزواوية 45 درجة، ادفع اللقمتين أي النهاية المستديرة للعظمة (المفصلات) نحو الجزء الخلفي من الساق، كما هو مبين في الشكل B.

مع الحفاظ على موقع المفصلات، أربط بإحكام حزام الفخذ السفلي (رقم 3).

C) اسحب المفصلات إلى الأمام قليلاً قبل ربط حزام قصبية الساق الأمامية (الطنبُوب) (رقم 4). لا تسحب المفصلات بعد الخط المنصف للساق

بعد ذلك، اربط بإحكام حزام بطة الساق العلوي (رقم 5). لا تتبالغ في شدّ الأحزمة.

D) عندما يكتمل ربط جميع الأحزمة، يجب أن تكون العلاقات مركزة فقط فوق أعلى صابونة الركبة وقليلًا بعد الخط المنصف للساق.

لضمان عدم حدوث أي نزوح خلال النشاط، يوصى بثني الركبة عدة مرات أو المشي لبضع دقائق. بعد ذلك شدّ الأحزمة ثانية واتبع الخطوات التالية A-D من أجل توافق محكم ومريح.

تعليمات لتعديل المفصلة

براغي تعديل المقاومة (الشكل E)

اخلع الدعامة، أخرج رفائد اللقمة، أخرج المفتاح من داخل المفصلة، أخرج برغي التعديل. أدخل برغي التعديل ثانية إلى الموقع المطلوب وفقاً لراحة المريض وبروتوكول إعادة التأهيل الذي وضعه الطبيب (1-منخفض، 2-متوسط، 3-مرتفع). ادفع برغي التعديل للأسفل حتى تلامس أسنان اللولب سطح المفصلة (E1) لفت مفتاح ألن لشدّ التعديل حتى يصبح رأس البرغي مستويًا مع سطح المفصلة (E1). لا تشدّ الحزام أكثر مما يجب. كرر العملية للمفصلة الأخرى.

يجب أن تكون المفصلتان بنفس الوضعية.

تغيير نهايات الثني الخارجي المعيارية (الشكل F)

أخرج البرغي كليًا. انزع التوقف وأدخل التوقف الجديد. ضعه بصف مع الثقب في لوحة المفصلة، أدخل البرغي ثانية، وشدّه. كرر العملية للمفصلة الأخرى. ينبغي أن تكون للمفصلتين نفس النهاية.

شغل المقاومة وأوقفها. (الشكل G)

أخرج الأداة من داخل غطاء المفصلة (G1). ضع الدعامة بحالة انثناء، أدخل الأداة لداخل فتحة التشغيل/الإيقاف (G2)، وحركها. "O" يعني أن الدعامة بحالة "إيقاف" أو أنها بدون مقاومة. عندما تبتعد عن "O"

فالدعامة بحالة "تشغيل" أو لديها مقاومة. حالما يتم تعديل المفصلتين، أرجع الأداة للفتحة.

الاستعمال والعناية

- المنتج معدّ لاستخدام مريض واحد فقط.
- إذا كان من الضروري إعادة الربط أثناء النشاط، أعد ربط جميع الأحزمة متبعا الخطوات في تعليمات الاستعمال.
- يمكن قصّ كل الأحزمة والرفائد لتناسب مع الاختلافات الفردية بمحيط الطرف باستثناء DonJoy A22.
- قد يستخدم المشد في الماء العذب أو المالح. بعد الاستخدام في الأنشطة المائية، تخلص من الماء كليًا واشطف بمياه نظيفة ونقية ثم نشفها بالهواء.
- اغسل باليد البطانات، الأحزمة ورفائد اللقمة في مياه باردة مع منظف معتدل. نشفهم في الهواء فقط؛ لا تنشف بالحرارة البطانات،

الأحزمة أو الرفائد الجافة. بالنسبة للنموذج DonJoy A22، البطانات والأحزمة غير قابلة للإزالة. استعمل قطعة فماش رطبة مع مادة تنظيف معتدلة من أجل غسل البطانات والأحزمة باليد. اشطف كل الدعامة بالماء البارد. ونشفها في الهواء.

- تفقد براغي العلاقة للربط وإعادة الشد حسب الحاجة بشكل متكرر.
- قم بتزييت المفصلات بشكل دوري بواسطة مادة تزييت جافة أو بخاخ تفلون TM.
- لتزييت آلية المفصلة الداخلية، ضع الدعامة بحالة انثناء ورش لداخل الجزء الخلفي من غطاء المفصلة.
- هذا الجهاز غير معدّ للاستخدام مع أجهزة أخرى باستثناء تلك المسجلة على وجه الخصوص كملحقات لهذا الجهاز.

استشر طبيبك أو المُعالج دائمًا قبل إجراء تغييرات بالدعامة.

الكفالة

لدعامات الركبة من DonJoy وفقاً لمواصفات، ستقوم DJO, LLC بتصليح أو استبدال كل أجزاء منتج وكذلك ملحقاته بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر للمنسوجات ولمدى الحياة لهيكل الدعامة/المفصلات من تاريخ البيع.

لدعامات الركبة الجاهزة من DonJoy، ستقوم DJO, LLC بتصليح أو استبدال كل المنتج أو جزء منه وكذلك ملحقاته بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر للمنسوجات ولسنة واحدة لهيكل الدعامة/المفصلات من تاريخ البيع.

لدعامة الركبة DonJoy A22، ستقوم DJO, LLC باستبدال كل ملحقاتها (رفائد اللقمة) بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر و-12 شهراً لهيكل الدعامة/المفصلات/

الأحزمة والبطانات (باستثناء الاهتراء والتمزق الطبيعي) من تاريخ البيع.

لرياضة التصادم (كرة القدم الأمريكية)، كفالة الهيكل/المفصلات/الأحزمة والبطانات لمدة ستة أشهر.

لاستخدام مريض واحد فقط.

RX فقط

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الذي يعرضه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

تنبيه: يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.