



#### دعامة الكاحل المخيطة

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

بروفيل المستخدم المقصود

يجب أن يكون المستخدم قادرًا على ما يلي:

- قراءة وفهم التوجيهات، التنبيهات والتحذيرات.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

دعامة الكاحل مع سنادة للدعم والضغط.

#### الميزات

- دعامة الكاحل المخيطة البلاستيكية مع ضغط مزدوج وسنادات الجانبية.
- تعمل السنادات الجانبية على توفير الضغط على نؤ الكاحل وزيادة الحماية والضغط على الأنسجة المفصالية اللينة وتشابكات الأوتار.
- لا تتجدد ولا تنزلق من أجل راحة اللبس
- يتطابق تلقائيًا مع زاوية الارتداد السفلية.
- نسيج يتكيف شكله للمبنى التشريحي بثلاثة أبعاد لتوفير ضغط
- مادة صالحة للتنفس

#### دلائل الاستعمال

- الاستخدام بعد عملية جراحية أو بعد الصدمة، أو لالتهاب المزمن في الأنسجة اللينة في منطقة الكاحل.
- شعور بعدم الاستقرار
- إلتواءات
- إصابات الأربطة، ضعف الأربطة
- للألم المرتبط بالجل في القدم والكاحل
- التهاب المفاصل
- تورم

- فصال عظمي خفيف

موانع الاستعمال

لا توجد موانع استعمال معروفة.

ينبغي استخدام الدعامة MALLEOFORCE® Ankle Support فقط بعد استشارة أخصائي الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من الأعراض التالية:

- أمراض جلدية وإصابات في المنطقة الكاحل المصابة (مثل تغيرات جلدية متعلقة بالحساسية، تهيج، ندبات مع تورم، احمرار، ارتفاع حرارة الجسم)
- دوالي وريدية مع اضطرابات جريان رجوعي
- اضطرابات لمفاوية، تورم غير محدد في النسيج اللين
- اضطرابات بالدورة الدموية أو اضطرابات حسية في الساقين

تحذير واحتياطات

المنتج معدّ لاستخدام مريض واحد فقط. إذا ظهر ألم، تورم، تغيرات في الإحساس أو ردود فعل غير عادية أخرى أثناء استخدام هذا المنتج، عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

تعليمات الاستعمال

1. اجلس لتتلائم مع MALLEOFORCE®.
2. لف دعامة الكاحل للأسفل من الحد العلوي الأزرق بعيداً حتى تصل لسنادات السيليكون.
3. ثم امسك الدعامة بواسطة السنادات واسحبها فوق قدمك.
4. تكون الدعامة متطابقة بشكل صحيح عندما يجلس الكعب بثبات في مكانه ويتم وضع السنادات الجانبية خلف وأسفل الكاحل.
5. اسحب الطرف العلوي من الدعامة مرة أخرى وسويها فوق القدم والكاحل.

تعليمات الاستخدام

- تُلبس الضمادة مباشرة على الجلد. ولذلك، يجب أن لا يكون في الجلد أي إصابات وأن يكون خالي من المرطبات أو الزيت أو الشحم أو الجل أو ما بقايا المواد المشابهة عند لبسه.
- الدعامة معدة لاستخدام مريض واحد فقط.
- ينبغي عدم لبس الدعامة لأكثر من 8 ساعات في اليوم.
- مع الاستخدام السليم ومراعاة كل التعليمات، لن تظهر نقاط ضغط.
- لن يتحمل المنتج أية مسؤولية عن أي تغييرات في المنتج أو عن استخدام غير صحيح.

العناية

- ينبغي غسلها في مياه فاترة (30 درجة مئوية على الأكثر) مع مادة منظفة معتدلة
- نشفها في الهواء (لا تضعها على مشعاعات/سخانات أو غيرها من مصادر الحرارة)
- لا تستخدم مواد التبييض أو الكلور، الكي ممنوع.

التركيب

المواد المنسوجة: مادة البولي أميد، إيلاستين، بوليستر / السنادة: السيليكون / الغطاء: قماش تيري

تحذير: يحتوي هذا المنتج على لاتكس من المطاط الطبيعي الذي قد يسبب ردود فعل حساسية.

معدّ للاستخدام على مريض واحد

بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.