

MalleoForce®



קְרָסוּלִית סְרוּגָה

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

הפרופיל של המשתמש המיועד

המשתמש חייב להיות מסוגל:

- לקרוא ולהבין את ההוראות, האזהרות ואמצעי הזהירות.

שימוש מיועד/התוויות

קְרָסוּלִית עִם כְּרִית סִילִיקוֹן תּוֹמַכֵּת הַמְסַפְקֵת תְּמִיכָה וְלַחֵץ

תכונות

- קְרָסוּלִית סְרוּגָה הַלּוֹחֶצֶת בַּאֲמִצְעוֹת מֵתַח כְּפּוֹל, וְכְרִיּוֹת צַדִּיּוֹת
- הַכְרִיּוֹת הַצַּדִּיּוֹת מְקַלְלוֹת אֶת הַלַּחֵץ מֵעַל זִיזֵי הַקְרָסוֹל וּמַגְבִּירוֹת אֶת הַהֲגָנָה וְהַלַּחֵץ עַל הַרְקֵמָה הַרְכָּה בַּמְפָּרֵק וְעַל מַאֲחִזֵי הַגִּידִים.
- הַקְרָסוּלִית נְטוּלוֹת קִמְטִים וְאִינָה מַחְלִיקָה, כִּךְ שֶׁהַשִּׁימוֹשׁ בֶּה נּוֹחַ יוֹתֵר
- הַתְּאֵמָה אֲנִטוֹמִית הוֹדוֹת לְזוּוֹיֵת הַסְטָה נְמוּכָה
- סְרִיג בַּעַל הַתְּאֵמָה תֵּלֶת-מִמְדִּית לְקוּוֵי הַמֵּתָאֵר הָאֲנִטוֹמִיִּים, הַמְסַפֵּק לַחֵץ
- חוֹמֵר נוֹשֵׁם

התוויות

- שִׁימוֹשׁ לְאַחַר נִיתוּחַ אוֹ לְאַחַר טְרַאוּמָה, דִּלְקַת כְּרוֹנִית שֶׁל הַרְקֵמָה הַרְכָּה בַּאֲזוֹר הַקְרָסוֹל
- תַּחוּשֵׁת חוֹסֵר יְצִיבוּת

- נקעים
- פציעות ברצועות, חולשה של הרצועות
- כאבים בכף הרגל ובקרוסול הקשורים לעומס
- נוזלים במפרק
- נפיחות
- דלקת מפרקים ניוונית קלה

התוויות נגד

אין התוויות נגד ידועות.

יש להשתמש בקרוסולית MALLEOFORCE® רק לאחר התייעצות עם איש צוות רפואי, עם הופעת התסמינים הבאים:

- מחלות עור ופציעות באזור הקרוסול (לדוגמה, שינויים בעור עקב אלרגיה, דלקת, צלקות עם נפיחות, אדמומיות, היפרתרמיה)
- דליות עם הפרעות הכוללות חזרת דם אחורה
- הפרעות לימפתיות, נפיחות לא ספציפית של הרקמה הרכה
- הפרעות במחזור הדם או הפרעות תחושה ברגליים

אזהרות

המוצר מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד. אם מופיעים במהלך השימוש במוצר זה כאב, נפיחות, שינויי תחושה או תגובות חריגות אחרות, יש לפנות מיד לרופא.

הוראות יישום

1. שב כדי ליישם את MALLEOFORCE®.
2. גלגל למטה את הגבול העליון של הקרוסולית עד רפידות הסיליקון.
3. לאחר מכן אחוז בקרוסולית ברפידות, משוך והלבש אותה על כף הרגל.
4. הקרוסולית מותאמת נכון כאשר העקב ממוקם היטב במקומו והרפידות הצדדיות ממוקמות מאחורי העקב ומתחתיו.
5. משוך שוב כלפי מעלה את הקצה העליון של הקרוסולית ויישר אותה מעל לכף הרגל ולקרוסול.

הוראות שימוש

- את הקרוסולית מניחים ישירות על העור. לכן כשמוניחים את הקרוסולית העור חייב להיות ללא פציעות וללא לחות, שמנים, קרמים, גלים או שיירים דומים.
- הקרוסולית מיועדת לשימוש של מטופל יחיד בלבד.
- אין לעטות את הקרוסולית במשך יותר מ-8 שעות ביממה.
- בשימוש נכון והקפדה על כל ההוראות לא אמורות להופיע נקודות לחץ.
- היצרן לא יישא באחריות לכל שינוי במוצר או לשימוש לא נכון.

הוראות ניקוי

- יש לכבס ביד במים קרים (לכל היותר 30°) עם סבון כביסה עדין

- יש לייבש באוויר (אין להניח על רדיאטור/תנור חימום או על מקור חום אחר)
- אין להשתמש במלבין או בכלור. אין לגהץ.

הרכב

סריג: פוליאמיד, אלסטין, פוליאסטר / רפידה: סיליקון / כיסוי: אריג מגבת
זהירות: מוצר זה מכיל גומי לטקס טבעי העלול לגרום לתגובות אלרגיות.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.