



قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم. بروفييل المستخدم المقصود

يجب أن يكون المستخدم قادرًا على ما يلي:

- قراءة وفهم التوجيهات، التنبيهات والتحذيرات.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

دعامة مطاطية مع دعامة لينة خاصة براحة اليد مصنوعة من الألمنيوم وحزام ضغط قابل للانعكاس.

الميزات

- دعامة راحة اليد قابلة للانعكاس مصنوعة من الألمنيوم لتثبيت الرسغ.
- حزام قابل للإزالة لضبط مستوى الضغط
- نسيج يتكيف شكله للمبنى التشريحي بثلاثة أبعاد لتوفير ضغط مريح ومنتظم
- مادة صالحة للتنفس

دلائل الاستعمال

- انتفاخ مفصل الرسغ و/أو الأنسجة اللينة المزمنة، وبعد الجرح أو بعد العملية الجراحية.
- إلتواءات الرسغ
- التهاب وتر الرسغ (التهاب غمد الوتر)
- فصال عظمي خفيف
- آلام الرسغ المفصالية (آلم مفصلي)
- دعامة للمصابين بأعراض النفق الرسغي

موانع الاستعمال

ينبغي استخدام الدعامة فقط بعد استشارة أخصائي الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من الأعراض التالية:

- أمراض جلدية وإصابات في المنطقة المصابة (مثل تغيرات جلدية متعلقة بالحساسية، تهيج، ندبات مع تورم، احمرار، ارتفاع حرارة الجسم)
- اضطرابات لمفاوية، تورم النسيج الرخو بشكل غير واضح في المنطقة المصابة
- اضطرابات بالدورة الدموية أو اضطرابات حسية في المنطقة المصابة

تحذير واحتياطات

إذا ظهر ألم، تورم، تغيرات في الإحساس أو ردود فعل غير عادية أخرى أثناء استخدام هذا المنتج، عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

تعليمات الاستعمال

1. اختار نموذج الدعامة الأيسر أو الأيمن وفقًا لليد المصابة.
2. اسحب الدعامة فوق اليد والرسغ، بوضع الإبهام في الجانب المفتوح.

3. للحصول على الوضع الصحيح، تأكد من أن ثقب درج السيلكون الموضوع على باطن الدعامة يغطي نتؤ الجزء الجانبي (الخارجي) من الرسغ.

4. يمكن تعديل دعامة راحة اليد القابلة للزرع حسب احتياجات الأفراد بواسطة ثنيها بحرص.

5. اربط حزام الدعامة القابلة للزرع إلى قطعة القطائف الصغيرة على الجانب الداخلي من الدعامة إذا لزم الأمر ولفه حول الرسغ. سيوفر الحزام ضغط إضافي وثبات كثير، عدله وفقاً لاحتياجاتك. تجنب شدّ الحزام أكثر مما يجب وحرره على الفور إذا شعرت بأنه ضيق للغاية.

نصيحة: عند استخدام الحزام القابل للإزالة، تجنب التلامس المباشر بين إبريم وحلقة الحزام والدعامة المنسوجة، لأن ذلك سيتلف الجانب المرئي للنسيج.

6. إذا لم يعد هناك حاجة لدعامة الألمنيوم للحصول على الثبات، يمكن نزعها. لنزع الدعامة، ارفع الدعامة من الطرف الأعلى بلطف واسحب دعامة الألمنيوم خارج جيبيها.

#### تعليمات الاستخدام

- إذا قمت بلبس الدعامة مباشرة على الجلد، ينبغي أن يكون الجلد خاليًا من الإصابات، الرطوبة، الزيوت، الكريمات، الجل أو بقايا مواد مشابهة عند استخدام الدعامة.
- ينبغي عدم لبس الدعامة لأكثر من 8 ساعات في اليوم.
- مع الاستخدام السليم ومراعاة كل التعليمات، لن تظهر نقاط ضغط.
- لن يتحمل المنتج أية مسؤولية عن أي تغييرات في المنتج أو عن استخدام غير صحيح.

#### العناية

- ينبغي غسلها باليد في مياه فاترة (30 درجة مئوية) مع مادة منظفة معتدلة
- نشفها في الهواء (لا تضعها على مشعاعات/سخانات أو غيرها من مصادر الحرارة)
- لا تستخدم مواد التبييض أو الكلور، الكي ممنوع.
- التركيب
- المواد المنسوجة: مادة البولي أميد، إيلاستين، بوليستر، لاتكس من المطاط الطبيعي
- الحشوة: سيليكون
- الغلاف الداخلي: قماش تيري
- الحزام: بولي أميد
- الدعامة: ألمنيوم

تحذير: يحتوي هذا المنتج على لاتكس من المطاط الطبيعي الذي قد يسبب ردود فعل حساسية.



معدّ للاستخدام على مريض واحد

إبطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.