

## MyBabystrap™ EVOLUTION



### حزام الأمومة

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتعمن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

### هدف الاستعمال/دلالتل الاستعمال

- ألم أسفل الظهر بسبب الحمل.
- دعم منطقة البطن أثناء فترة الحمل.
- للمساعدة في تخفيف عدم الارتياح في فترة الحمل بسبب الانقباضات والتوسعات في البطن.

### موانع الاستعمال

• لا توجد

#### تحذير واحتياطات

المنتج معدّ لاستخدام مريض واحد فقط. إذا ظهر ألم، تورم، تغيرات في الإحساس أو ردود فعل غير عادية أخرى أثناء استخدام هذا المنتج، عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

#### تعليمات الاستخدام

- (1) ضع دعامة أسفل البطن حول الخصر، باستخدام حلقات اليد.
  - اربط دعامة أسفل الظهر باستخدام سداة الحلقات على الدعامة من الأمام.
  - (2) اسحب الأحزمة الخلفية لتعديل مستوى الضغط.
  - (3) اربط دعامة أسفل الظهر باستخدام سداة الحلقة على الدعامة من الأمام باستخدام سداة الحلقات.
  - (4) عندما ينمو الطفل، يمكن توسيع حزام الأمومة (Maternity Belt).
- لكي توسع دعامة أسفل الظهر، أعد وضع أحزمة البطن الخلفية كما يلي:

- انزع دعامة منطقة أسفل الظهر.
  - فك أحزمة البطن من خلال فكها من الحلقات والعروات الداخلية حيث تكون مثبتة وإدخالها من خلال الفتحات المثبتة قريبة من الجانب الأمامي لدعامة أسفل الظهر.
  - عند الحصول على الطول المناسب، ثبت أحزمة البطن من خلال ربطها من الحلقات والعروات الداخلية المثبتة قريبة من الفتحات.
  - ضع دعامة أسفل البطن حول الخصر، باستخدام حلقات اليد.
- من خلال تعديل الوضع أحزمة البطن الخلفية، يمكن تكيف حزام الأمومة ليناسب حجم الخصر حتى نهاية فترة الحمل.

#### العناية

اغسله في مياه فاترة مع مادة منظفة خفيفة. لا تستعمل مواد التبييض. اشطفها جيداً. نشفها في الهواء. لا تجففه في النشافة. لا تنظفه بالتنظيف الجاف. الكي ممنوع.

#### التركيب

البوليستر، البولي أميد، البولي يوريثين، الإلستين، القطن والصلب والبولي كاربونيت

#### بدون لاتكس



#### مخصص للاستخدام على مريض واحد فقط

كفالة بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.