
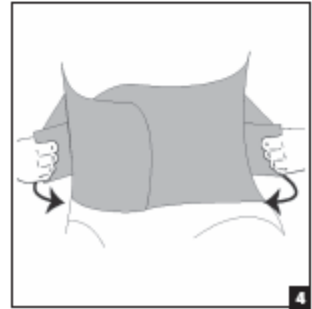
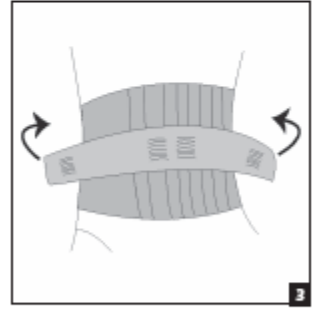
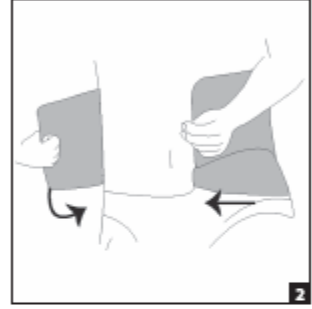


MYSTRAP

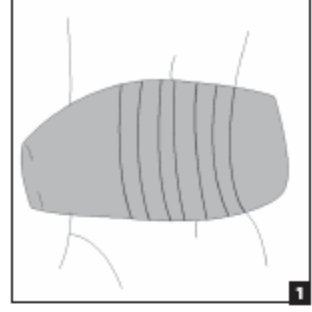

حزام دعم مرن لأسفل الظهر

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

موانع الاستعمال: لا يوجد.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال:

- دعامة مطاطية قطنية مع 4 أحزمة شدّ قطنية مرنة وحزامي شدّ للبطن.
- يوصف لعلاج ألم حاد أو مزمن في أسفل الظهر.

تحذير: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.

تعليمات الاستخدام:

- (1) ضع دعامة الظهر بواسطة وضع الجزء الظهرى على أسفل الظهر مع الحرص على مركزتها على طول محور العمود الفقري.
- (2) عدّل وشّد دعامة الظهر حول الخصر وفقاً للدعم المطلوب. اغلقها بإحكام باستخدام إغلاق التلامس على الجزء الأمامي من الدعامة.
- (3) عدّل وشّد الأحزمة الجانبية، واحرص على ان يكون قسمها المركزي في المركز على طول محور العمود الفقري.
- (4) اسحب حواف الحزامين الجانبيين، في نفس الوقت، وثبتهما بإحكام على الجزء الأمامي من الدعامة.

تعليمات العناية: اغسلها في مياه باردة.

لا تستعمل مواد التبييض. نشفها في الهواء. لا تجففه في النشافة. لا تنظفها بالتنظيف الجاف. الكي ممنوع.

يحتوي هذا المنتج على لاتكس.



مخصص لاستخدام مريض واحد.

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.