
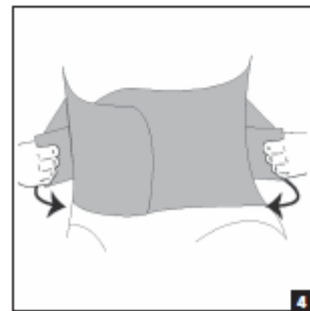
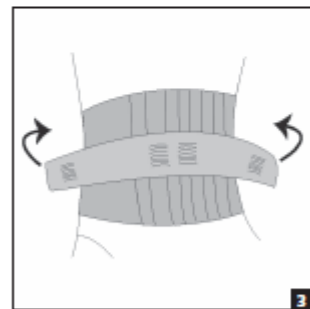
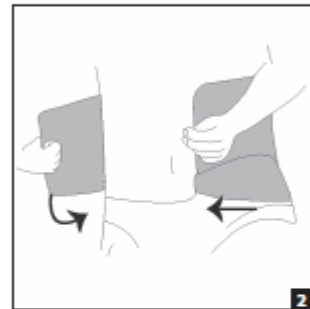


# MYSTRAP

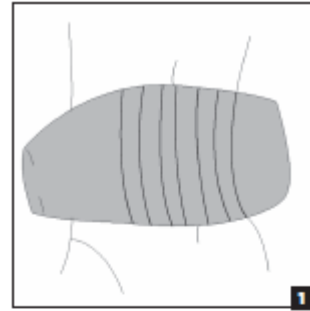

## חגורת גב אלסטית

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

## התוויות נגד: אין.

## שימוש מיועד/התוויות:

- תמיכה גמישה במותן עם 4 רצועות מותניות גמישות ושתי רצועות בטניות.
- מותווה לטיפול בכאבי גב תחתון חריפים או כרוניים.

אזהרה: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

#### **הוראות יישום:**

1) מקם את חגורת הגב על ידי הנחת החלק האחורי על הגב התחתון והקפד למרכז אותו לאורך ציר עמוד השדרה.

2) התאם והדק את חגורת הגב סביב המותניים בהתאם לתמיכה הנדרשת. הדק באמצעות לשוניות הצמדן שבקדמת החגורה.

3) התאם והדק את הרצועות הרוחביות, והקפד למרכז את החלק המרכזי שלהן לאורך ציר עמוד השדרה.

4) משוך בשתי הרצועות הרוחביות בו-זמנית והדק אותן על החלק הקדמי של החגורה.

**הוראות ניקוי:** יש לכבס ביד במים קרים.

אין להשתמש בחומר מלבין. יש לייבש באוויר. אין לייבש במייבש כביסה. אין לנקות בניקוי יבש. אין לגהץ.

מוצר זה מכיל לטקס.

#### **מיועד לשימוש של מטופל יחיד.**

**אחריות:** חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

**לתשומת לבך:** למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.