
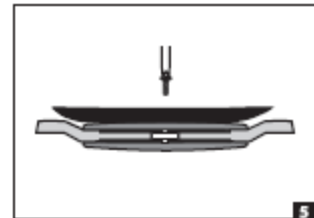
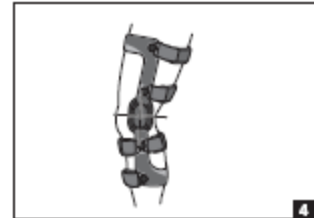
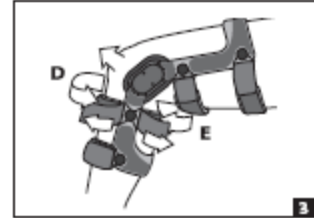
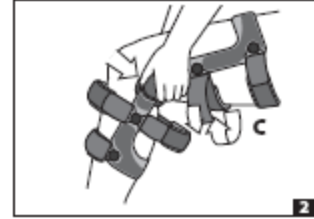


## OA FullForce® Knee Brace

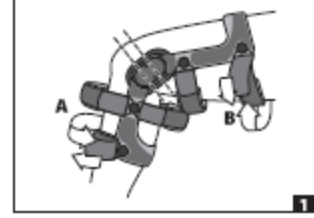

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتعمن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

داوعي الاستعمال: المرضى المصابون بالأعراض والنتائج الجسدية أو وجود أدلة التصوير الإشعاعي على وجود مرض مفصلي تنكسي. لقد تم تصميم هذا المنتج لتكملة مجموعة من العلاجات الطبية الشائعة للآلام المذكورة أعلاه. يجب تحديد تكرار ومدة الاستخدام من خلال وصفها من قبل أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

(1) عند الجلوس على حافة الكرسي، أخطو مستخدمًا المشد. اثني الركبة 45 درجة، وضع المشد كما هو مبين في الشكل 1، وثبت المفصل في المركز حول "1" (2.54سم) فوق أعلى صابونة الركبة وخط الوسط قليلاً بعد الساق. تحقق من أن المشد غير ملتوي حول الساق.

أولاً، ثبت أسفل شريط بطة الساق (أ)، ثم أعلى الحزام المربوط (ب).

(2) حافظ على الركبة مثنية 45 درجة، وادفع كلا اللقم (العلاقات) نحو ظهر الساق، كما هو مبين في الشكل 2.

للحفاظ على وضع العلاقات، ثبت الحزام السفلي الخاص بالفخذ (ج) على ظهر الساق.

(3) اسحب المفصل للأمام قليلاً قبل ربط حزام قصبه الساق الأمامي (عظم الساق الأكبر) الحزام (د). لا تسحب المفصلات بعد الخط المنصف للساق

ثبت الحزام العلوي لبطة الساق (هـ). احرص على عدم سحب هذا الحزام بقوة مما يسبب خطر الإصابة بمشاكل في الدورة الدموية.

(4) عندما يكتمل ربط جميع الأحزمة، يجب أن تكون العلاقات مركزة فقط فوق أعلى صابونة الركبة وقليلًا بعد الخط المنصف للساق. لضمان عدم حدوث انزلاق خلال النشاط، يوصى بالقيام بقليل من عمليات ثني الركبة أو المشي لمدة دقائق قليلة، ومن ثم إعادة ربط الأحزمة.

### التعليمات للحصول على العلاقة المعدلة المحملة

يحتوي إطار الطوق الخاص بك على قاعدة صلبة تصحح الحمولة التي تبنى عليها. قد تقوم بعمل "ضبط دقيق" للحمولة على قاعدتك من خلال القيام بما يلي: أدر براغي التعديل باتجاه عقارب الساعة باستخدام مفتاح الربط المرفق. قد تعدل البرغي الأمامي والخلفي بناءً على مواجهته للركبة وراحة الحمولة. لا تيرم أي برغي أكثر من 4 لفات بدون المسامير الموجودة خلف البرغي الآخر المعدل.

احرص على ثني آلة التعديل لا تتجاوز 10 دورة كاملة لأن ذلك قد يسبب خلع اللوحة من مكانها. إذا حدث هذا، اعكس العملية. دائماً حمل الطوق حسب راحتك ومستوى نشاطك.

ملاحظة: حتى إذا لم تشعر بتخفيف فوري، فهذا لا يعني أن الدعامة لا تعمل. قد يحتاج ذلك عدة أسابيع للحصول على نسيج ناعم في الركبة لتعديل العمولة الزائدة المثبتة بواسطة الطوق.

### تعليمات حول التوقفات القابلة للتغيير

**العلاقة المعيارية - يأتي المشد الخاص بك مع توقفات مثبتة تصل إلى امتداد 10 درجات.**

لتغيير التوقفات المثبتة، أولاً انزع البرغي تماماً كما هو مبين. ثم انزع التوقفات. ادخل التوقفات الجديدة، حاذي مع الثقوب في حزام المفصلة، ثم أعد إدخال البرغي. مفك فيليبس مصلب، وتحقق من أن البراغي موضوعة في التجاويف ومربوطة تماماً. (الشكل 5)

المفصلة القابلة للتعديل - لتغيير النهايات على المفصلة القابلة للتعديل، عليك أولاً إزالة لقمة التحميل القابلة للتعديل من المفصلة عن طريق التبدل ذهاباً وإياباً ولف البراغي في اتجاه عقارب الساعة حتى تتم إزالة اللوحة. انزع التوقف وأدخل التوقف الجديد. استبدل سنادة التصغير، وحاذي البراغي مع ثقوب حزام العلاقة.

بينما ترفعها بثبات، استخدم مفتاح الربط لتديره عكس عقارب الساعة حتى تتداخل المسننات. لف للخلف والأمام بين البراغي حتى تعود السنادة إلى وضعها الأصلي. (الشكل 6)

يجب أن يكون كل من التوقف الوسطي والجانبى متطابقين في الدرجة.

توقفات الامتداد: 0 درجة، 10 درجة، 20 درجة، 30 درجة و 40 درجة. توقفات الثني: 0 درجة، 45 درجة، 60 درجة، 75 درجة و 90 درجة (لا يوجد توقفات انحناء مثبتة على شحنة السلع) الاستخدام والعناية

- إذا كان من الضروري إعادة الربط أثناء النشاط، أعد ربط جميع الأحزمة متباعدة الخطوات في تعليمات الاستعمال.
- قد يتم تشذيب جميع الأحزمة وسنادات التثبيت لتلائم مع الفروق الفردية في محيط الأطراف.
- قد يستخدم المشد في الماء العذب أو المالح. بعد الاستخدام في النشاطات المائية، جففه كلياً واشطفه بماء نظيف وماء عذب ورم جففه في الهواء.
- اغسل بطانات وسنادات تثبيت اللقمة الخاصة بك يدوياً في ماء بارد مع مطهر لطيف. يجفف في الهواء فقط، لا تسخن البطانات أو سنادات تثبيت اللقمة الجافة.
- تطلب آلية العلاقة قليل من الصيانة في الوضع العادي. ومع ذلك، قد تستخدم مواد التشحيم الجافة مثل رذاذ Teflon<sup>TM</sup> للآلية الداخلية للعلاقة. يوصى بمواد التشحيم الجافة بعد الاستخدام في الماء.
- تفقد براغي العلاقة للربط وإعادة الشد حسب الحاجة بشكل متكرر.

استشر طبيبك أو المُعالج دائماً قبل إجراء تغييرات بالدعامة.

**تحذير:** ينبغي استعمال هذا المنتج تحت إشراف أخصائي بالمجال الطبي. هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام عام غير خاضع للرقابة. إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.

لاستخدام مريض واحد فقط.

**RX فقط**

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الشامل الذي يقدمه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

تنبيه: يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.