


OA Lite

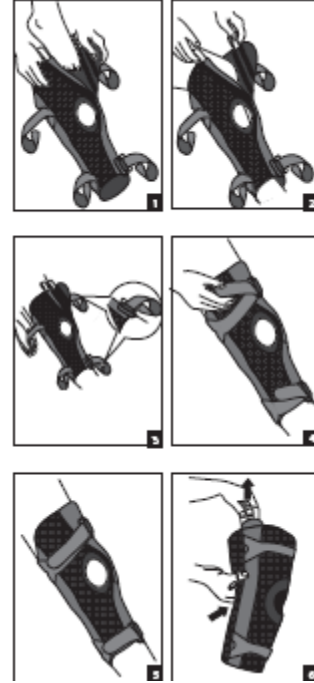

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

تخفيف الحجرة الأحادية (حجرة واحدة) هشاشة عظام الركبة (الروماتيزم التنكسي).

موانع الاستعمال: لا يوجد

تحذيرات واحتياطات:

إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.

معلومات حول الاستعمال:

(1) فك وأرخ أحزمة الفخذ وبطة الساق. فك قسم الفخذ من OA Lite بمسك قطعة الفخذ الخارجية وسحب الحلقة والعروة جانباً على الساق من الأمام (الشكل 1).

(2) امسك عروات السحب على المنطقة العلوية داخل المشد واسحب OA Lite على الساق لتتأكد من أن الطرف المفتوح لضمادة الفخذ إلى الأمام من الفخذ. اسحب OA Lite بعيداً بقدر كافٍ فوق الساق لكي تحاذي المنطقة السفلية من الدائرة المقطوعة مع أسفل الرضفة (صابونة الركبة) (الشكل 2).

ملاحظة: يجب وضع قضيب المفصلة على الجانب غير المؤلم من الركبة.

(3) أعد ربط قسم الفخذ بإمساك الحلقة من تحت القلاب باستخدام يد واحدة والسطح القابض للقلاب الخارجي باليد الأخرى. يجب أن يتطابق OA Lite على قدر الجسم حول صابونة الركبة مزوداً بضغط مريح بدون الشعور بالضيق أو عدم الراحة (الشكل 3).

(4) اربط حزام بطة الساق، ثم حزام الفخذ لتثبيت المشد بشكل مريح حول ركبتك (الشكل 4).

معلومات الربط الاختياري:

للحصول على ربط كفاي كامل في الفخذ و / أو بطة الساق، يرجى اتباع تعليمات الاستخدام المذكورة أدناه. كلا الحزامين قابل للتعديل للحصول على الحد الأمثل من الراحة.

(1) اربط الحزام الأطول من الحزامين المربوطين إلى قسم الفخذ الحلقة-d لكي تلتف من خلالها وتربط الظهر بنفسها (الشكل 5).

ملاحظة: طرف واحد فقط يمكنه أن يربط الظهر إلى الحزام؛ ستكون مادة العروة المجددة مواجهة للخارج.

سيلتف هذا الحزام حول ظهر الفخذ ويرتبط بمادة العروة على الحزام العلوي للفخذ المثبت فعلياً إلى OA Lite. إذا كان الحبل طويلاً جداً، انزع لسان @Velcro من نهاية الحزام، ثم قص الحزام بالمقص لتجعل الطول مناسباً.

(2) استبدل حزاماً واحداً مع الأقصر من الاثنين المرفقين في قسم بطة الساق.

نزع قضبان العلاقة (من أجل الغسيل):

(1) فك قسم الفخذ من OA Lite ولف ظهر المادة على المنطقة العلوية لتكشف العلاقة وتفك غطاء العلاقة.

(2) خارج OA Lite في مركز العلاقة، ارفع شريط Velcro بعيداً عن المشد وادخل إصبع اليد تحت العلاقة لتخرج الحلقة والعروة.

(3) مع بقاء إصبع اليد تحت العلاقة، اسحب قضيب البار المثني في قسم الفخذ لتنزع القضيب من OA Lite. (الشكل 6)
تعليمات التنظيف:

يغسل يدويًا في ماء بارد (86 درجة فهرنهايت / 30 درجة مئوية) باستخدام صابون لطيف، ويشطف تمامًا. جففه في الهواء. قد يتم نزع العلاقات للغسيل.
ملاحظة: إذا لم يشطف جيدًا، قد يسبب الصابون المتبقي التهيج وتلف المواد.

المواد المستخدمة

البوليستر والنايلون والسبانديكس لايكرا والمطاط والألمنيوم والفولاذ

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

لاستخدام مريض واحد فقط.

RX فقط

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.