


OA Lite

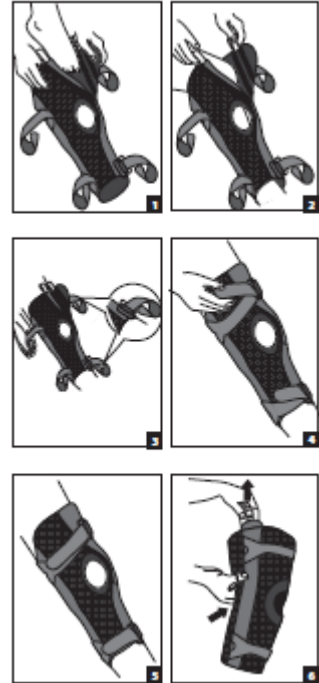

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות:

דלקת מפרקים ניוונית קלה חד-צדדית של הברך.

התוויות נגד: אין

אזהרות:

אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

אופן היישום:

(1) התר ושחרר את רצועות השוק והירך. שחרר את חלק הירך של ה-OA Lite באחיזת חלק הירך החיצוני והפרדת הצמדן שבחלק הקדמי של הרגל (תרשים 1).

(2) אחוז את לולאות המשיכה מהחלק הפנימי העליון של המייצב ומשוך את ה-OA Lite על הרגל והקפד שהקצה הפתוח של הברכית נמצא בקדמת הירך. משוך את ה-OA Lite מספיק גבוה על הרגל כך שהחלק התחתון של הפתח העגול יתיישר לפי החלק התחתון של פיקת הברך (תרשים 2).

הערה: יש למקם את זרוע הציר בצד הלא כואב של הברך.

(3) חבר מחדש את חלק הירך באחיזת הלולאה של הכנף התחתונה ביד אחת ומשטח האחיזה של הכנף החיצונית ביד השנייה. ה-OA Lite צריך להיות מהודק בנוחות סביב פיקת הברך תוך הענקת לחיצה נוחה ללא התכווצות או אי-נוחות (תרשים 3).

(4) הדק את רצועת השוק ואז את רצועת הירך כדי להדק את המייצב בנוחות סביב הברך (תרשים 4).

מידע אופציונלי על סגירת הרצועות:

לסגירת רצועות נוספת על מלוא היקף הירך ו/או השוק, עקוב אחר הוראות היישום המפורטות להלן. שתי הרצועות מתכווננות במלואן לנוחות מרבית.

(1) חבר את הרצועה הארוכה מבין שתי הרצועות הכלולות לטבעת ה-D של חלק הירך כך שתעבור דרכה ותתחבר בחזרה לעצמה (תרשים 5).

הערה: רק קצה אחד יכול להתחבר בחזרה אל הרצועה; חומר הלולאה הפרוטי יפנה כלפי חוץ.

רצועה זו נכרכת סביב החלק האחורי של הירך ומחברת את חומר הלולאה על רצועת הירך העליונה שכבר מקובעת ל-OA Lite. אם הרצועה ארוכה מדי, כוונן את האורך בקצה החיבור לטבעת ה-D.

(2) חזור על שלב 1 עם הקצרה מבין שתי הרצועות הכלולות עבור חלק השוק.

הסרת זרועות הציר (לכביסה):

(1) שחרר את חלק הירך של ה-OA Lite, גלגל את החומר בחלק העליון כדי לחשוף את מעטפת הציר ושחרר את כיסוי הציר.

(2) בצד החיצוני של ה-OA Lite, במרכז הציר, הרם את לשונית הצמדן הרחק מהמייצב והחלק אצבע מתחת לציר כדי לשחרר את הצמדן.

(3) כאשר אצבעך עדיין מתחת לציר, משוך את זרוע הציר הבולטת בחלק הירך כדי להסיר את הזרוע מה-OA Lite. (תרשים 6)

הוראות ניקוי:

יש לכבס ביד במים קרים (30°C) עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר. יש להוציא את הצירים כדי לכבס את הברכית.

הערה: אם האביזר לא נשטף היטב שאריות סבון עלולות לגרום לגירוי בעור ולהתפוררות החומר.

החומרים המשמשים

פוליאסטר, ניילון, לייקרה ספנדקס, חומר אלסטי, אלומיניום, פלדה

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.

במרשם בלבד

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.