


OA REACTION WEB Knee Brace

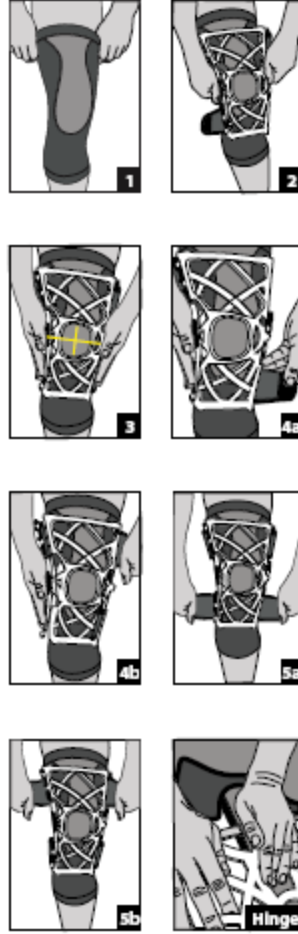

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل ويتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلالتل الاستعمال: تم تصميم مشد الركبة OA REACTION WEB ليساعد في تخفيف آلام هشاشة عظام الركبة بواسطة حجرة التخلص من الحمل على المفصل المصاب. دواعي الاستعمال هي التخفيف لكسر حدة الألم رضفة الفخذ أو الإجهاد وتخفيف حدة ألم التخلخل العظمي في الركبة. **موانع الاستعمال:** لا يوجد **تحذيرات واحتياطات:** إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك.

معلومات حول الاستعمال:

1. اسحب الكم حتى تشعر بالراحة وتكون الرضفة متمركزة في فتحة بشكل الساعة الزجاجية. **ملاحظة:** لبس الكم اختياري.
 2. مد النسيج فوق أعلى مفصل الركبة، مثبتاً النسيج من خلال محاذاة الفتحة مع الرضفة (صابونة الركبة).
 - ملاحظة:** يوجد الشعار DonJoy على النسيج من الخارج، ويكون داخل النسيج مختم.
 3. تأكد من وجود مفصلة التخلص من الحمل (مع سنادة السيليكون) في مركز مفصل الركبة.
 - 4أ. ادخل الأحزمة المرتخية من خلال الفتحات على الجانب المقابل من مفصلة التخلص من الحمل لبطة الساق. ثم ثبت الحزام إلى جانب العروة الخلفية من سنادة الظهر.
 - 4أ. كرر العملية مع الفخذ.
- ملاحظة:** يجب وضع الجانب المادي من سنادة الظهر على الجلد ويجب أن تكون الحلقة الجانبية السوداء بعيداً عن الساق.

15. عندما تكون جميع العروات ثابتة لضمان الشد المناسب، ارفع واسحب الأحزمة السفلية والعلوية لبطة الساق حتى تصبح على قدر الجسم.

16. كرر العملية مع الزوج العلوي لأحزمة (الفخذ) العلوية يجب أن يكون المشد على قدر الجسم ومريح، لا تشده أكثر من اللازم.

تعديل مفصلة التخلص من الحمل: ضع مفصلة التخلص من الحمل على حافة الطاولة. ضع الفخذ للأعلى على حافة الطاولة حول "1" فوق المفصلة واضغط نحو الأسفل على قسم بطة الساق للأعلى لتعمل انتشاء في الجهة العليا. كرر العملية على في القسم السفلي من بطة الساق إذا لزم الأمر.

ملاحظة: تأكد من أن المريض حصل على كمية مريحة من الضغط من مفصلة التخلص من الحمل. **تعليمات التنظيف:** يمكن غسل كل من الأجزاء البلاستيكية والسنادات يدويًا مع صابون لطيف في ما فاتر. اشطف كلاهما تمامًا جفهما في الهواء بشكل منفصل.

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

لاستخدام مريض واحد فقط.

RX فقط

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الذي يعرضه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

تنبيه: يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.