


OA REACTION WEB Knee Brace

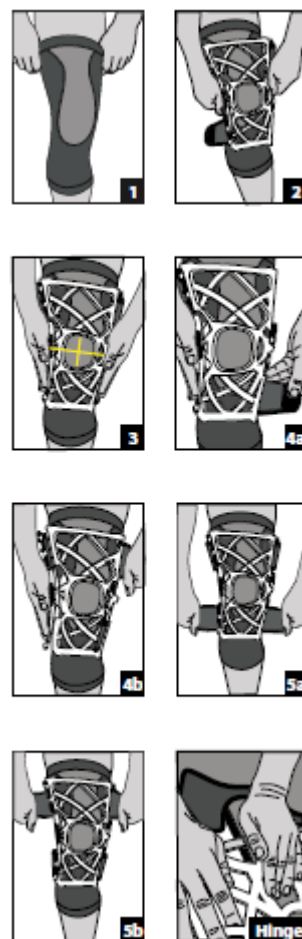

לפני שימוש במכשיר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות: מייצב הברך OA REACTION WEB נועד לסייע בהפחתת כאב בברך עקב דלקת מפרקים ניוונית בהקלת העומס על צד המפרק הפגוע. ההתוויות לשימוש הן דלקת מפרקים ניוונית חד-צדדית קלה עד בינונית של הברך ופיקת הברך, ושיקום לאחר ניתוח.

התוויות נגד: אין

אזהרות: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

אופן היישום:

1. משוך בשרוול כלפי מעלה עד שימוקם בנוחות, ופיקת ברך תהיה ממורכזת בפתח בצורת שעון החול. **הערה:** לבישת השרוול היא אופציונלית.
2. הנח את הרשת מעל החלק העליון של מפרק הברך, ומרכז את הרשת על ידי יישור הפתח מול פיקת הברך.
- הערה:** בחלק החיצוני של הרשת יש לוגו של DonJoy, ובחלקה הפנימי יש גומות.
3. ודא שציר הקלת העומס (עם רפידת הסיליקון) מונח במרכז מפרק הברך.
- 4א. הכנס את רפידת הרצועות המשוחררת דרך הפתחים שבצד הנגדי של ציר הקלת העומס על השוק. לאחר מכן הדק את הרצועה לצד הלולאה השחור של הרפידה האחורית.
- 4ב. חזור על הפעולה על הירך.

הערה: יש להניח את הצד האפור של הרפידה האחורית על העור ואת הצד השחור של הלולאה הרחב מהרגל.

5א. כדי להבטיח הידוק נאות לאחר שכל הרצועות מוצמדות, הרם ומשוך את שתי הרצועות התחתונות (של השוק) עד להידוק נוח.

5ב. חזור על כך גם עם הרצועות העליונות (של הירך) – המייצב צריך להיות צמוד ונוח, אל תהדק יתר על המידה.

כוונון ציר הקלת העומס: הנח את ציר הקלת העומס בקצה השולחן. הצב את הזרוע האנכית של הירך על קצה השולחן כ-2.5 ס"מ מעל הציר ולחץ מטה על חלק השוק של הזרוע האנכית כדי ליצור בה כיפוף. חזור על כך בחלק התחתון (של השוק) במידת הצורך.

הערה: ודא שהמטופל מקבל כמות נוחה של לחץ מציר הקלת העומס. **הוראות ניקוי:** יש לכבס את הרשת, חלקי הפלסטיק והחלקים הרכים ביד במים פושרים עם סבון כביסה עדין. יש לשטוף את שניהם היטב. יש לייבש באוויר בנפרד.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד

במרשם בלבד

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, אביזר זה הוא רק גורם אחד בתכנית הטיפול הכוללת שקבע איש הצוות הרפואי. אין ערבות לכך שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.

זהירות: על פי החוק הפדרלי (ארה"ב), מכירת אביזר זה מותרת רק על-ידי איש צוות רפואי מורשה או בהוראתו.