
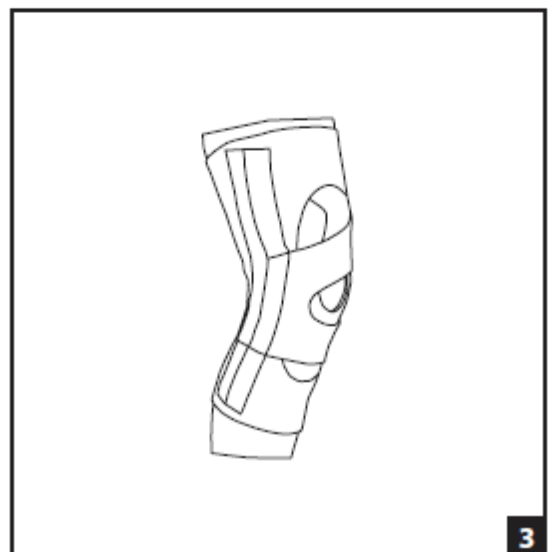


Patellofemoral Supports

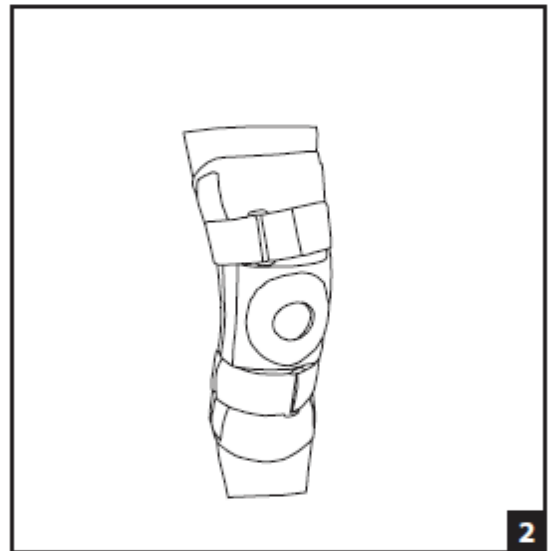

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

دلائل الاستعمال: لاضطرابات فخذية رضفي (عظمة الركبة).

1) كم للركبة مع سند

أمسك حواف الكمّ من جهة الفتحة الأكبر. أدخل رجليك لداخل الكمّ، واسحبه حتى يصبح على الركبة بحيث تحيط الفتحة الأمامية عظمة الركبة.

2) كم للركبة مع أحزمة وسند

إذا تضمن الكمّ أحزمة، مررها عبر حلقات D وثبتها بإحكام.

ابدأ بالحزام السفلي أولاً. ينبغي أن تكون الأحزمة مشدودة بدون تقييد الدورة الدموية القاصية.

3) دعامة ركبة للرضفة الجانبية

ضع الكمّ كما هو مبين في المرحلة A. لفّ واربط حزام النيوبرين السفلي ومن ثم العلوي بالجزء الداخلي من الركبة.

لدعم الرضفة بالكامل - ضعها كما في الخطوة A.

لدعم الرضفة السفلية - ضعها كما في الخطوة A. تأكد من أن السند يجلس تحت عظمة الركبة تمامًا واربط الحزام بإحكام.

لدعم سند سفلي بشكل "H" - ضعها كما في الخطوة A. تأكد من أن السند يجلس تحت عظمة الركبة تمامًا.

لدعم سند علوي بشكل "H" - ضعها كما في الخطوة A. تأكد من أن السند يجلس فوق عظمة الركبة تمامًا.

لدعم سند على شكل حدوة - قبل وضع الدعامة، يمكن وضع حدوة حصان باتجاه التحكم المطلوب. ضعها كما في الخطوات A & B.

لدعامة رضفة قابلة للتعديل على شكل حلقة ودعامات حلقيّة فاخرة

- يمكن قصّ الحلقة الأنبوبية على يد أخصائي الرعاية الصحية للحصول على اتجاه الدعم المطلوب. لقصّ الحلقة، اقلب الدعامة من الداخل إلى

الخارج أولاً. جد الشق في الدعامة، حدد مكان الحلقة، قصّ بالمقص وتخلص من الحلقة الزائدة. ضعها كما في الخطوة A.

الاستعمال والعناية

اغسلها بمياه دافئة باستخدام صابون خفيف، اشطفه جيّداً.

ونشفها في الهواء. ملاحظة: إذا لم يشطف جيّداً، قد يسبب الصابون المتبقي التهيج أو تلف المواد.

تحذير: ينبغي عدم استخدام دعامات مصنوعة من نيوبرين من قبل أفراد لديهم قابلية معروفة لالتهاب الجلد أو حساسية للمنتجات المشتقة من نيوبرين.

تحذير: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي

يعالجه.

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من

تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.