

## סרט זרוע פנאומטי



לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

**שימוש מיועד/התוויות:**

למרפק טניס

**התוויות נגד: לא רלוונטי**

**אזהרות: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי. הידוק מוגזם של סרט הזרוע הפנאומטי עלול לפגוע בזרימת הדם. אם חשת בעקצוץ או בחוסר תחושה, שחרר את הרצועה.**

**אופן היישום:**

1. כרוך את הסרט סביב הזרוע (כשהלוגו של Aircast פונה החוצה).

הדק את הרצועה באופן רופף.

2. התאם את סרט הזרוע כך שכרית האוויר תהיה ממורכזת מעל או מתחת לאמה.

3. כוונן מחדש את הרצועה כך שתהיה סגורה במידה נוחה.

**הוראות ניקוי:**

יש לכבס ביד במים פושרים עם סבון כביסה עדין. יש לייבש באוויר.

**אחריות:** חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

**מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.**

**נטול לטקס**

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.