


DONJOY

Pol'ax 1

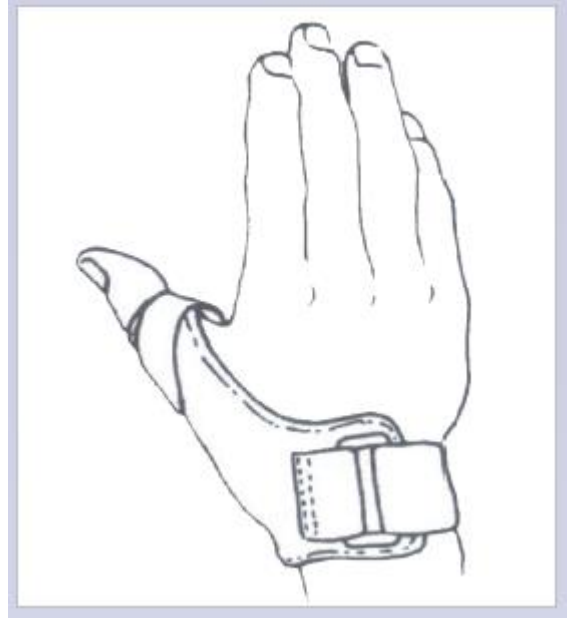

DJO
GLOBAL



قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

- تثبيت جزئي للإبهام. التهاب المفاصل. إصابات في المفصل والأربطة. التواءات بمشط اليد-قصبه الاصبع.

موانع الاستعمال

- ينبغي تشكيل الدعامة بشكل صحيح لتوافق كامل مع شكل يد المستخدم.

تحذير واحتياطات

إذا ظهر ألم، تورم، تغيرات في الإحساس أو ردود فعل غير عادية أخرى أثناء استخدام هذا المنتج، عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

تعليمات الاستعمال

تصل الدعامة مغلقة بتفريغ الهواء في كيس بلاستيكي. عند تسخين الدعامة في ماء ساخن، لا تتخلص من الغطاء البلاستيكي، من أجل تجنب تبلل الدعامة.

طريقة التسخين: حوض من الماء

- 1) اغمر دعامة الإبهام (بدون إزالة كيس البلاستيك) في الماء الذي تم تسخينه إلى 70 درجة مئوية (+/- 3 درجات مئوية). اترك الدعامة مغمورة لمدة 3 دقائق (أو الوقت الكافي لتكون مرنة بما فيه الكفاية لإعطائها الشكل الصحيح).
- 2) أخرج دعامة الإبهام من الماء وتخلص من الغلاف البلاستيكي.
- 3) ضع الدعامة على الإبهام المصاب واغلق الأحزمة.
- 4) حافظ على الدعامة في مكانها حتى تبرد كلياً. سوف تعود الدعامة لصلابتها الأولية. إذا لم تكن راضياً عن النتيجة، كرر الإجراء.

العناية

دعامة من بوليمر، اغسلها بالماء البارد مع مواد تنظيف معتدلة. اربت عليها حتى تجف.

يمنع الكي، التبييض والتنظيف الجاف

التركيب

القماش: 88% بولي أميد - 12% إيلاستين / بلاستيك: بوليمر

بدون لاتكس

معدّ للاستخدام على مريض واحد

بإطار كفاءة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.