


Pol'ax 1

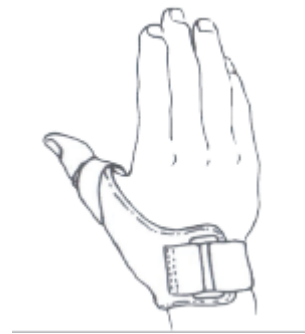

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות

• מניעת תזוזה חלקית של הבהן. דלקת מפרקים. פציעות של המפרקים והרצועות. נקעים מטה-קרפופלנגיאליים (בין עצמות המסרק לגלילים).

התוויות נגד

• הסד צריך להיות מעוצב כראוי כדי להתאים באופן מושלם לצורת היד של המשתמש.

אזהרות

אם מופיעים במהלך השימוש במוצר זה כאב, נפיחות, שינויי תחושה או תגובות חריגות אחרות, יש לפנות מיד לרופא.

הוראות יישום

הסד נשלח באריזת ואקום בתוך נרתיק פלסטיק. בעת חימום הסד במים חמים, אל תסיר את כיסוי הפלסטיק, על מנת למנוע מהסד להירטב.

שיטת החימום: אמבט מים

1) טבול את סד הבהן (מבלי להסיר את נדן הפלסטיק) במים שחוממו ל-70°C (+/- 30°C) השרה את הסד במשך 3 דקות (או זמן מספיק כדי יהפוך לגמיש מספיק כדי לעצבו כראוי).

2) הוצא את כיסוי הבהן מהמים והסר את כיסוי הפלסטיק.

3) הנח את הסד על הבהן הפגועה וסגור את הרצועות.

4) החזק את הסד במקומו עד שהתקרר לחלוטין. הסד יחזור לקשיחותו הראשונית. אם אינך מרוצה מהתוצאה, חזור על התהליך.

הוראות ניקוי

סד פולימרי יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין. יש לייבש בטפיחות. אין לגהץ ואין להלבין או לנקות בניקוי יבש.

הרכב

טקסטיל: 88% פוליאמיד - 12% פולימר: אלסטיין / פלסטיק

נטול לטקס

מיועד לשימוש של מטופל יחיד

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.