


مشد الظهر Porostrap

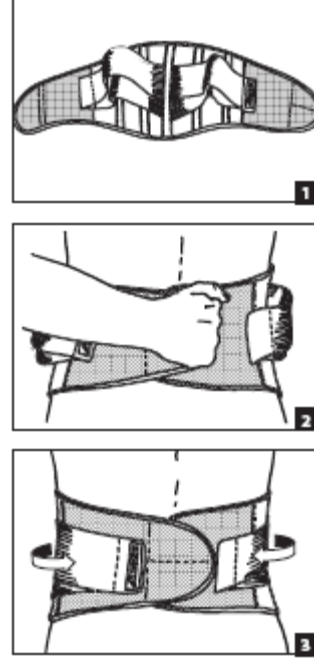

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم. هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

ألم الظهر اللطيف أو المزمن أو الحاد / ألم أسفل الظهر.

موانع الاستعمال/احتياطات:

للاستخدام الصحيح، تحقق من اختيار الحجم الكافي ولشد الأشرطة الجانبية اسحب حسب الحاجة

تعليمات الاستخدام:

(1) اسحب للداخل نحو معدتك. حرر الأشرطة الجانبية المطاطية لترتخي. ضع الحزام حول الخصر وأغلق (سدادة الاتصال) الأمامية. اسحب للداخل نحو معدتك.

(2) شد الأشرطة الجانبية المطاطية بأقصى ما تحتاج وثبتها من الأمام باستخدام عروات سدادات الاتصال.

تعليمات العناية:

اغسلها بمياه باردة

لا تستعمل مواد التبييض

لا تنظفها بالتنظيف الجاف

الكي ممنوع

المكونات: 45% بولي أميد - 28% بوليستر -

18% قطن - 9% لاتكس

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

تحذير لاتكس نقاط اتصال لاتكس

مخصص للاستخدام لمريض واحد فقط.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.