
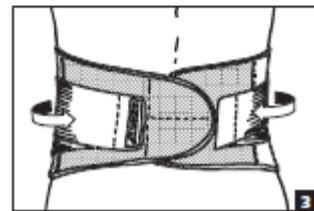
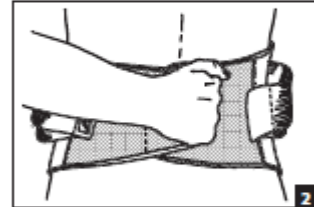


# Porostrap

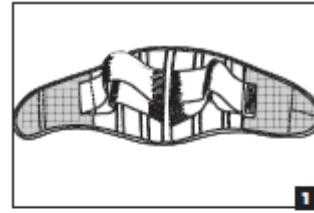

לפני שימוש במכשיר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

## שימוש מיועד/התוויות:

כאב גב קל, כרוני או אקוטי / מתנת (לומבגו).

## התוויות נגד/אזהרות:

לשימוש נכון, הקפד לבחור את המידה המתאימה ולהדק את רצועות המשיכה הצדדיות לפי הצורך

## הוראות יישום:

1) הכנס את הבטן. שחרר את רצועות המשיכה הצדדיות הגמישות כך שיהיו חופשיות. מקם את החגורה סביב המותניים וסגור מלפנים (באמצעות הצמדן). הכנס את הבטן.

2) הדק את רצועות המשיכה הצדדיות הגמישות לפי הצורך, והצמד אותן מלפנים באמצעות לשוניות הצמדן.

## הוראות ניקוי:

יש לכבס במים קרים

אין להשתמש בחומר מלבין

אין לנקות בניקוי יבש

אין לגהץ

הרכב: 45% פוליאמיד - 28% פוליאסטר -

18% כותנה - 9% לטקס

**אחריות:** חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

**אזהרת לטקס: מכיל לטקס**

**מיועד לשימוש של מטופל יחיד.**

**לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.**