


## مشدات الركبة Post-Op

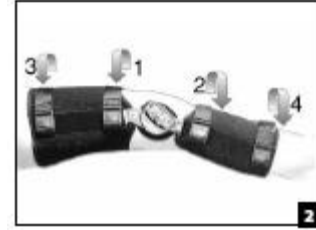

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل ويتمن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

**هدف الاستعمال/دلالات الاستعمال:** للثبيث ومجال حركية محمي مرتبط بعمليات جراحية في الرباط الصليبي الأمامي (ACL)، الرباط الصليبي الخلفي (PCL)، الرباط الجانبي الخارجي (LCL)، الرباط الجانبي الداخلي (MCL) وتصلجات الأربطة الهلالية.

لقد تم تصميم هذا المنتج لتكملة مجموعة من العلاجات الطبية الشائعة للألام المذكورة أعلاه. يجب تحديد تكرار ومدة الاستخدام من خلال وصفها من قبل أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

(1) فك الأحزمة مع بقاء المريض جالساً أو مستلقياً، ادخل المشد تحت الساق المصابة.

يجب وضع مركز العلاقة على قليلاً فوق الرضفة المتوسطة. لف الإسفنج حول الساق واربط شريط "الحلقة الأمامية".

(2) بادئاً بالأحزمة الأقرب إلى الركبة، وادخلها في الأبزيم واسحب الأحزمة بثبات.

(3) لنزع الأبزيم غير المفتوحة، افتح أشرطة "الحلقة الأمامية"

واسحبها بعيداً عن الساق.

**تعليمات لتعديل العلاقة:**

لتعديل الانثناء والتمدد، اضغط الزر صم عدل الشريط للوضع المطلوب. قد يحتاج قضيب العلاقة للنقل ليسمح بالتعديل. لإغلاق العلاقة، عدل إلى الوضع المطلوب، اضغط على الزر وادخل الشريط في مكان الحلقة.

ملاحظة: يجب أن يتم مد الزر بالكامل حتى بعد تعديل زاوية الانثناء والتمدد أو إدخال القفل للتحقق من تثبيت الوضع.

**الاستعمال والعناية:**

- قد تنتهي قضبان العلاقة لتضيق تعارض للقوس أو المرفق. اثن كل قضيب جانبي بنسبة متساوية فوق الكوع والعلاقة. لا تحاول اثني أثناء رفع أطراف (الرؤوس) القضيب. قد يسبب هذا كسر القضيب في العلامة المركزية.

- تغسل البطانات الإسفنجية يدويًا في ماء بارد مع منظف لطيف. جففها في الهواء فقط، لا تسخنها. استشر طبيبك أو المُعالج دائمًا قبل إجراء تغييرات بالدعامة.
- تحذير:** ينبغي استعمال هذا المنتج تحت إشراف أخصائي في المجال الطبي. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام العام غير الخاضع للرقابة. إذا عانيت من أي ألم أو تورم أو تغييرات بالإحساس أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك.
- كفالة:** بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.
- مخصص للاستخدام لمريض واحد فقط.**
- RX فقط**
- غير مصنوع من لاتكس مطاط طبيعي**

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الذي يعرضه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

تنبيه: يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.