


מייצבי ברך לאחר ניתוח

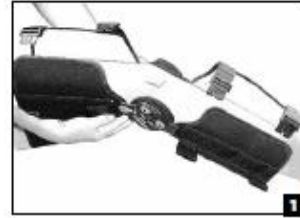

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים חיוניים לתפקודו התקין של האביזר.

התוויות: מניעת תזוזה וטווח תנועה מוגן הקשורים לניתוחי רצועה צולבת קדמית (ACL), רצועה צולבת אחורית (PCL), רצועה קולטרלית צדית (LCL) ורצועה קולטרלית אמצעית (MCL) ולתיקונים של המניסקוס.

מוצר זה תוכנן כהשלמה למגוון הטיפולים הרפואיים השכיחים, המיועדים לטיפול במכאובים כמו אלה המתוארים לעיל.

איש הצוות הרפואי שרשם לך את המוצר יקבע את תדירות ומשך השימוש.

1) פתח את האבזמים של כל הרצועות. כאשר המטופל יושב או שוכב, החלק את המייצב תחת הרגל הרלוונטית.

מרכז הצירים צריך להיות ממוקם מעט מעל אמצע פיקת הברך. כרוך את הספוג סביב הרגל וחבר את לשונית "הוו הקדמי".

2) החל ברצועות הקרובות ביותר לברך, סגור את האבזמים ומשוך את הרצועות באופן מהודק.
3) להסרה, פתח את האבזמים, פתח את לשוניות "הוו הקדמי" והרחק מהרגל.

הוראות לכוונן הציר:

לכוונן כפיפה ופשיטה, לחץ פנימה את הכפתור ואז התאם את הלשונית למיקום הרצוי. ייתכן שיהיה צורך להזיז את זרוע הציר כדי לאפשר כוונן. כדי לנעול את הציר, כוון למיקום הרצוי, לחץ על הכפתור והכנס את הלשונית למצב נעילה.

הערה: הכפתור צריך לפנות כלפי מעלה לחלוטין לאחר התאמת זווית הכפיפה והפישוט או הכנסת המנעול כדי להבטיח מצב מאובטח.

שימוש וניקוי:

- זרועות הצירים עשויות להיות כפופות להוספת קווי מתאר של וארוס או ולגוס. כופף כל זרוע צדית במידה שווה מעל ומתחת לציר. אל תנסה לכופף בעת החזקת הקצוות של הזרוע. הדבר עלול לגרום לזרוע להישבר במקום הסימון.
- יש לכבס ביד את רפידות הספוג במים קרים עם סבון כביסה עדין. יש לייבש באוויר בלבד, אין לייבש בחום.

לפני עריכת שינויים במייצב יש להתייעץ תמיד עם הרופא או המטפל.

אזהרה: יש להשתמש במוצר זה בפיקוח של איש צוות רפואי. האביזר אינו מיועד לשימוש ציבורי ללא פיקוח. אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד.

במרשם בלבד

לא מיוצר עם גומי לטקס טבעי

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, אביזר זה הוא רק גורם אחד בתכנית הטיפול הכוללת של איש הצוות בהוראתו. אין ערבות לכך שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.

זהירות: על פי החוק הפדרלי (ארה"ב), מכירת אביזר זה מותרת רק על-ידי איש צוות רפואי מורשה או בהוראתו.