


ProCare® Transitional 172 Cervical Collar

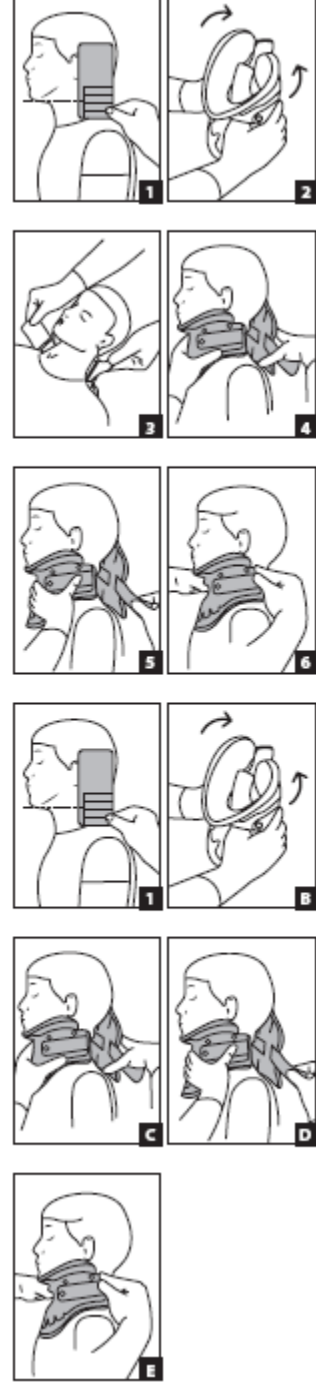

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

الحد من تقوس العمود الفقري العنقي والتمدد والاستدارة لتشجع المريض على الشفاء.

- الإلتواءات والآلام
- إصابات في تمدد الرقبة (حالات الإصابة بالرقبة نتيجة الارتداد)

- التغيرات التنكسية في العمود الفقري العنقي

موانع الاستعمال: لا يوجد

تحذيرات واحتياطات:

إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.

معلومات حول الاستعمال:

- (1) ضع المريض في وضع عادي محاذاً للرأس، ثم قم بقياس المسافة العمودية من رأس الذقن إلى أعلى الكتف باستخدام دليل قياس الأحجام.
- (2) قبل تشكيل المبرّد للحصول على راحة أفضل، مطابقة ومستقرة: اللوحة الأمامية – لف جوانب اللوحة نحو الداخل مع كلا اليدين. اللوحة الخلفية – لف أعلى اللوحة في الاسطوانة. تذكير: من المهم جدًا الحصول على الحجم والتطابق المناسب. قد لا يوفر تعديل المبرّد ليكون قصيرًا جدًا الدعم المناسب. قد يسبب تعديل المبرّد كثيرًا جدًا تمدد مبالغ فيه.
- (3) ضع اللوحة الخلفية تحت فجوة الرقبة حتى اللوحة بحيث تكون متمركزة تحت الرقبة.
- (4) مع بقاء المريض في وضع طبيعي محاذاً للرأس، ادخل القسم الأمامي من المبرّد فوق رقبة المريض وضع دعامة الذقن بالشكل الصحيح. تذكير: قبل استخدام المبرّد، عدله حتى يتم اختيار الحجم المناسب.
- (5) ارفع اللوحة الأمامية بقوة باستخدام يد واحدة في ثبات اللوحة الخلفية واربط كلا الجانبين إلى اللوحة الأمامية.
- (6) إذا لزم الأمر، يمكن أن يحسن التعديل الفرعي للأحزمة ودعامات اللوحات الأمامية والخلفية من الراحة والتطابق والاستقرار.

استخدام المرضى الخارجيين (العادل)

معلومات حول الاستعمال:

- (A) ضع المريض في وضع عادي محاذاً للرأس، قم بقياس المسافة العمودية من رأس الذقن إلى أعلى الكتف باستخدام دليل قياس الأحجام.
- (B) قبل تشكيل المبرّد للحصول على راحة أفضل، مطابقة ومستقرة: اللوحة الأمامية – لف جوانب اللوحة نحو الداخل مع كلا اليدين. اللوحة الخلفية – لف أعلى اللوحة في الاسطوانة. تذكير: من المهم جدًا الحصول على الحجم والتطابق المناسب. قد لا يوفر تعديل المبرّد ليكون قصيرًا جدًا الدعم المناسب. قد يسبب تعديل المبرّد كثيرًا جدًا تمدد مبالغ فيه.
- (C) مع بقاء المريض في وضع طبيعي محاذاً للرأس، ادخل القسم الأمامي من المبرّد فوق رقبة المريض وضع دعامة الذقن بالشكل الصحيح. تذكير: قبل استخدام المبرّد، عدله حتى يتم اختيار الحجم المناسب.
- (D) ارفع اللوحة الأمامية بقوة باستخدام يد واحدة. ضع اللوحة الخلفية تحت فجوة الرقبة حتى تصبح اللوحة متمركزة تحت الرقبة واربط كلا الجانبين إلى اللوحة الأمامية.
- (E) إذا لزم الأمر، يمكن أن يحسن التعديل الفرعي للأحزمة ودعامات اللوحات الأمامية والخلفية من الراحة والتطابق والاستقرار.

ملاحظة (اللوحة الخلفية والكماليات): استخدم لوحة أسفل الظهر

عندما تتصل اللوحة الخلفية المعيارية (المربوطة مع جميع المبرّدات) مع الأذنين و / أو يتداخل مبرّد اللوحة الأمامية مع النقطة التي يوجد فيها أقل من 2 " من اتصال الحلقة أو العروة على كل جانب (محيط يصل إلى 20"). استخدم لوحة الظهر الكبيرة عندما لا يلامس بلاستيك اللوحة الخلفية بلاستيك اللوحة الأمامية المعيارية (محيط يصل إلى 25").

الاستعمال والعناية: (تعليمات التنظيف والتخزين)

اغسله باليد بمياه دافئة درجة حرارتها (30 درجة مئوية) باستخدام صابون خفيف، واشطفه تمامًا. ونشفها في الهواء.

ملاحظة: إذا لم يشطف جيدًا، قد يسبب الصابون المتبقي التهيج وتلف المواد.

الكفالة

بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ينطبق مع اللوائح التنظيمية الحالية.

لاستخدام مريض واحد فقط.

RX فقط

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الذي يعرضه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

تنبيه: يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.