


Quadrant® Shoulder Brace

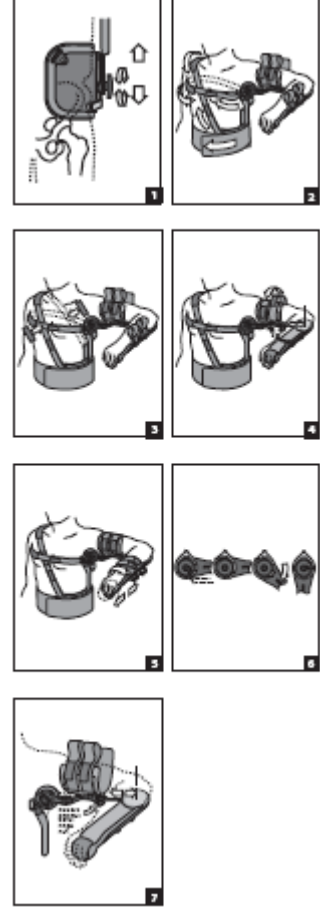

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستخدام الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم. دلائل الاستعمال: بعد عمليات جراحية لتصليح الكفة المدورة (مجموعة من العضلات والأوتار التي تقوم بتثبيت الكتف) • بعد عمليات جراحية لتصليح Bankhart • ما بعد تداول • اندماج الكتف.

لقد تم تصميم هذا المنتج لتكملة مجموعة من العلاجات الطبية الشائعة للآلام المذكورة أعلاه. يجب تحديد تكرار ومدة الاستخدام من خلال وصفها من قبل أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك. من أجل إعداد الدعامة للاستعمال الأولي، حرّر كل المفصلات بما في ذلك مفصلات الكتف والكوع. راجع تعديل المفصلة للحصول على تعليمات حول إقفال وفتح المفصلات.

بالإضافة لذلك، افتح كل الأحزمة، واحرص على طي أطراف الأحزمة للخلف على نفسها لتسهيل التعامل. ملاحظة: توضح هذه التعليمات استعمال الدعامة بينما يضطجع المريض بوضع مستلقٍ ما بعد عملية جراحية.

موانع الاستعمال: لا يوجد

معلومات حول الاستعمال:

- (1) عدّل قضيب الجذع وفقاً لطول المريض من خلال وضع لوح الورك الكبيرة في البداية بحيث يكون الإسفين الإسفنجي الذي داخل اللوح على عرف الحرقفة. حرر المقبض على اللوح وعدّل ارتفاع لوح الجذع بحيث تكون مفصلة الكتف العليا مصفوفة فوق المفصل الحقاني عضدي الأمامي أو أعلى بقليل.
- شدّ مقبض تعديل الارتفاع إلى واحد من بين أربعة أوضاع ارتفاع محددة.
- (2) انقل المريض لوضع جلوس مستقيم وقم بتمرير حزام الكتف للأعلى فوق الكتف غير المصابة وحزام الصدر على أعلى الظهر. ضع حزام الخصر عبر الطاولة، ورائ المريض تماماً فوق مستوى الورك.
- (3) ارجع المريض إلى وضع استلقاء واربط الأحزمة الثلاثة حسب الترتيب التالي: (1) حزام الكتف (وصلة بلوح الورك)، (2) حزام الصدر (حوالي الظهر وتحت الذراع المعاكسة، ووصلة بالحلقة العلوية الأمامية على القضيب المستقيم، و-3) تمرير حزام الخصر فوق منطقة المعدة. تأكد من أن كل الأحزمة مشدودة. ملاحظة: تستعمل قطع الايزيم الموصولة برفائد حزام الكتف والصدر من أجل وصل الحزامين معاً حيث يتقاطعان في الجزء الأمامي والخلفي من الصدر. سيساعد ذلك في الحفاظ على الأحزمة في مكانها. استخدم النقاط الملونة المشفرة التي على الأحزمة للمساعدة في تحديد مكان وجود نقاط الربط المناسبة.
- (4) عدّل الطول العضدي من خلال لفّ الماسورة السوداء الصغيرة، الموجودة تحت كمّ الذراع العلوي. تدوير الماسورة في اتجاه عقارب الساعة سوف يطوّل القضيب، والتدوير بعكس اتجاه عقارب الساعة سيقتصر القضيب. ينبغي أن تكون رفاة الكوع بصف مع اللقيمة الوسطى. شدّ الحزامين على الكمّ العضدي.
- (5) حرّر المقبضين على سطح سفلي من قضيب الساعد.

حرك كمّ الساعد حتى يصبح قسم الدعامة مع الزند للأعلى مرتاحاً في راحة اليد. كما يمكن أيضاً تدوير الكمّ ليتكيف مع البسط والكبّ. اربط الحزامين بإحكام فوق الساعد. بينما تكون الذراع بوضع التثبيت المرغوب، اقل كل المفصلات.

تعليمات لتعديل المفصلة

ملاحظة: يمكن فتح أي مفصلة أو دمج مفصلات لإتاحة تمرين مجال الحركة بسطح مسيطر عليه.

(6) مفصلات التباعد والثني (الموجودة على مفاصل الكتف والكوع)

حرّر مقبض الأمان الأسود الصغير 1-1 1/2 دورات بعكس اتجاه عقارب الساعة.

قم تدوير مقبض التعديل الأسود حتى يلائم داخل الموقع الحر. حالما تصبح المفصلة في المكان المرغوب من حيث الثني والتباعد، دَوّر مقبض التعديل الأسود حتى يستقر في وضعية الإقفال. شدّ مقبض الأمان باتجاه عقارب الساعة لضمان إحكام المفصلة.

(7) مفصلة الدوران الداخلي/الخارجي (الموجودة تحت كمّ أعلى الذراع)

حرّر مفصلة الماسورة النحاسية الدائنية من خلال تدويرها بعكس اتجاه عقارب الساعة. هذا سيحرر المفصلة وسيتيح دوراناً داخلياً/خارجياً. للإقفال في أي وضع مرغوب، لفّ الماسورة النحاسية باتجاه عقارب الساعة حتى تشعر بالمقاومة.

الاستعمال والعناية

- ينبغي توجيه المريض ليفحص إحكام المقابض بانتظام.
 - لوح الورك قابل للتشكيل بالحرارة إذا كانت هناك ضرورة لتغيير طفيف في الشكل.
 - يمكن تنظيف البطانة باليد بماء بارد. نشفها في الهواء.
- استشر طبيبك أو المُعالج دائماً قبل إجراء تغييرات بالدعامة.
- كفالة:** بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.