

מייצב ברך REACTION



לפני שימוש במכשיר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות: מייצב הברך REACTION מיועד לסייע בשיכוך כאב על ידי בלימת זעזועים והחזרת האנרגיה הקינטית לברך. ההתוויות לשימוש הן כאבים או שחיקה קלים עד בינוניים בפיקת הברך ודלקת מפרקים ניוונית קלה עד בינונית של הברך.

התוויות נגד: אין

אזהרות: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

אופן היישום:

1. משוך את השרוול כלפי מעלה עד שימוקם בנוחות, ופיקת הברך תהיה ממורכזת בפתח בצורה של שעון חול. (לבישת השרוול היא אופציונלית).
2. הנח את הרשת מעל החלק העליון של מפרק הברך, ומרכז את הרשת על ידי יישור הפתח מול פיקת הברך (תרשים 2ב').
3. השחל את הלשוניות בצד אחד של הרפידה האחורית דרך הפתחים הפנימיים ברשת והצמד את חלקי הצמדן המחוספסים לפני הצמדן הרכים של הרפידה האחורית. (הערה: יש להניח את צד חומר המרווח של הרפידה האחורית כלפי הרגל ואת צד לולאות הצמדן הרחק מהרגל. בצד החיצוני של הרשת יש לוגו, ובחלקה הפנימי יש גומות.)
4. השחל את הלשוניות המשוחררות של הרפידה האחורית דרך הפתחים הזמינים ברשת ואז הצמד את הלשוניות הצמדן המחוספסות למשטח לולאות הצמדן שברפידה האחורית.
5. לאחר שכל הלשוניות מוצמדות, כדי להבטיח הידוק נאות, הרם ומשוך את שתי הלשוניות התחתונות עד להידוק נוח.
- 5ב. חזור על כך עבור זוג הלשוניות העליונות – המייצב צריך להיות צמוד ונוח, אל תהדק יתר על המידה.

הוראות ניקוי: יש לכבס הן את חלקי הפלסטיק והן את הרפידות ביד במים פושרים עם סבון כביסה עדין. יש לשטוף את שניהם היטב. יש לייבש באוויר בנפרד.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.

נטול לטקס

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.